

ビブマウント (エプロンマウント) 取扱説明書

《使用方法》

- ①
ホースやコードに注意しながらビブマウント
を使用者の首にかけます。
- ②
ストラップの長さを調整します。




- ③
必要に応じて、ビブ部分にある調整用穴を利用しグースネック付きコンパクトジョイスティックを適切な高さに調整してください。



ご使用上の注意

- I, サイドリリースバックルに手をはさまないようにしてください。
- II, ジョイスティック取付けボルトにゆるみが無いよう定期的に点検を行ってください。
- III, ストラップとジョイスティックのコードが絡まないように設置してください。
- IV, 呼吸器ホースなどに干渉しないように設置してください。
- V, お手入れの際は、濡れた布で汚れた箇所を拭き取ってください。洗濯機にはかけないでください。

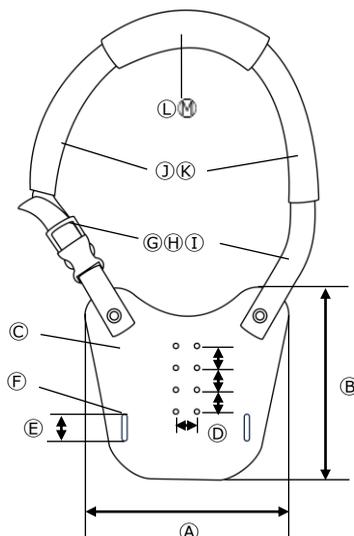

《仕様》

①ビブ部分幅：	約210mm
②ビブ部分高さ：	約195mm
③ビブ部分素材：	樹脂
④ビブ部分取付け穴ピッチ：	約22mm
⑤ビブ部分スリッド高さ：	約30mm
⑥ビブ部分スリッド幅：	約5mm
⑦ストラップ長さ：	約720mm
⑧ストラップ幅：	約25mm
⑨ストラップ素材：	ナイロン
⑩ストラップカバー長さ：	約480mm
⑪ストラップカバー素材：	ネオプレン
⑫首部カバー長さ：	約135mm
⑬首部カバー素材：	ネオプレン