

9 使用上のご注意とお願い

警告

- (1) 前腕サポートの上に乗ったり、座ったりしないでください。
 - ・前腕サポートが破損し、けがをする原因になります。
- (2) 前腕サポートを持って持ち上げたり運搬したりしないでください。
 - ・前腕サポートが破損して転倒し、けがをする原因になります。
- (3) 前腕サポートの改造をしたり、むやみに分解したりしないでください。
 - ・前腕サポートが正常に動かずに思わぬ事故、けがをする原因になります。

注意

- (1) ご使用前に前腕サポートにガタツキがないか、必ず確認して使用してください。
 - ・前腕サポートが正常に動かなかったり十分に機能しなかったりと、思わぬ事故原因になります。
- (2) 前腕サポートを固定しているネジ等の緩みの有無ついては、定期的に点検してください。
 - ・ネジ等が緩んだまま使用すると不安定になり、安全な使用に支障をきたします。
 - ・緩みがある場合は、すぐにネジ等を締め直してください。
- (3) 高温多湿の場所で使用したり、保管したりしないでください。
 - ・前腕サポート部品が変形したり劣化して、正常に動かなくなったりします。
 - ・保管するときは、直射日光を受けない乾燥した涼しい屋内に保管しましょう。
- (4) 前腕サポートに不具合があった場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

10 製品仕様とお手入れ方法

(1) 製品仕様

【仕様について】

- | | | |
|-----------|---|--|
| ○ サイズ・重量 | S | 約 305 mm × 120 mm × 80 mm ・ 約 750 g (片側) |
| | L | 約 340 mm × 120 mm × 80 mm ・ 約 850 g (片側) |
| ○ 角度調節ピッチ | | 7.5° |
| ○ 取り付けピッチ | | 20mm |
| ○ 高さ調節ピッチ | | 20mm |
| ○ 材質 | | エンジニアリングプラスチック、鉄、アルミ |

(2) お手入れ方法

【日常のお手入れについて】

- ぬれた場合は乾いた布でふき取ってください。
- フレームなどが汚れた場合は、中性洗剤を水で薄めてスポンジに含ませてふいた後、乾いた布でふき取ってください。


前腕サポート 角度調節部品

【取扱説明書】

このたびは有菌製作所の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

- 正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」お読みください。
- 必要な時に読めるように大切に保管してください。

1 各部の名称

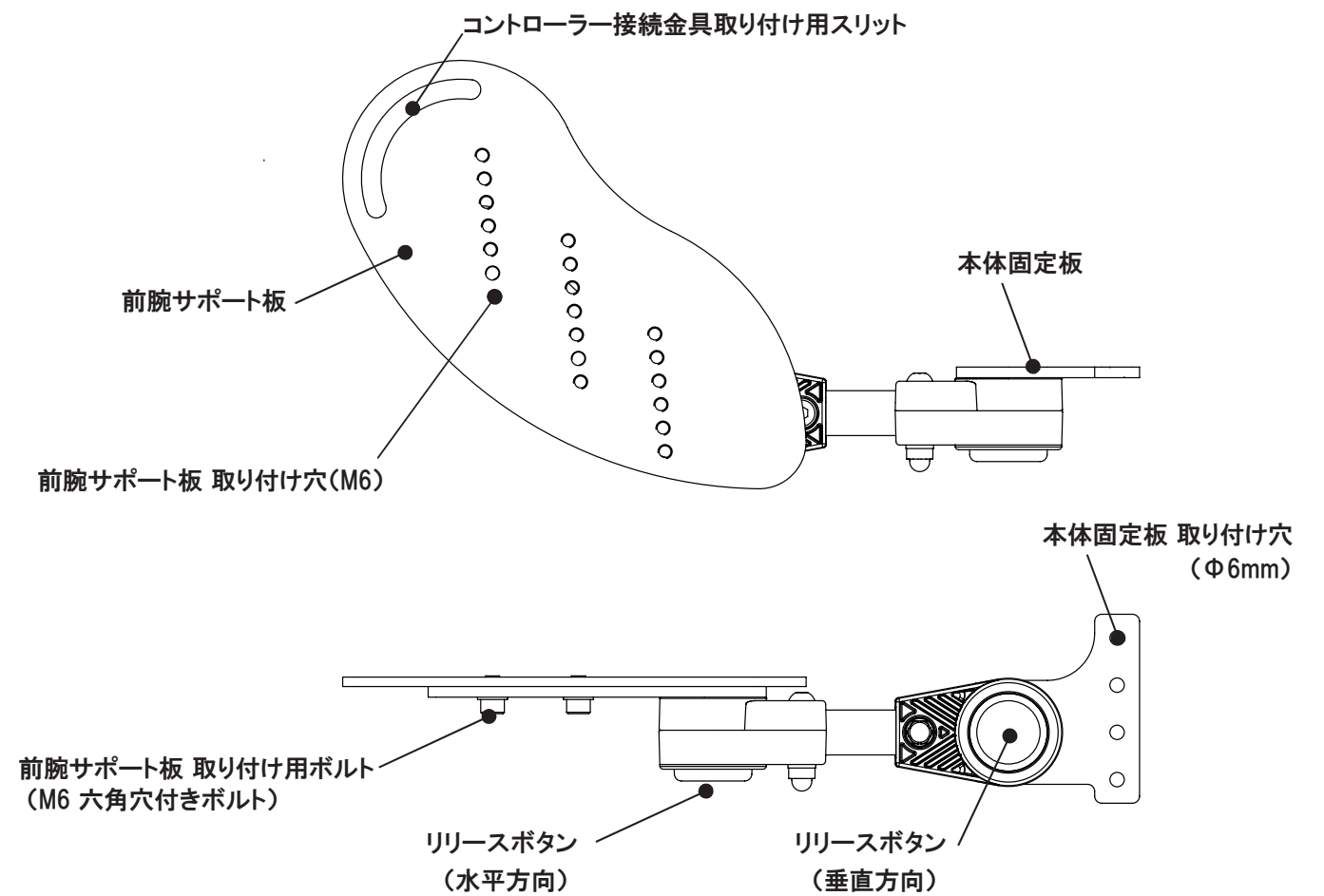

2 製品の特長

- (1) 前腕サポートの水平・垂直方向の角度調節、高さ調節が可能です。
- (2) 前腕サポートの水平・垂直方向の角度調節がワンタッチで行えます。
- (3) 前腕サポート板の取り付け位置を調節できます。
- (4) 取り付け用のスリットを使って、オプションのコントローラー接続金具の取付ができます。
- (5) 座位保持装置部品の認定基準及び基準確認方法の試験 (適応体重 25kg 越え、50kg 以下) に合格しています。

3 製品の取り付けについて

本製品は、座位保持装置（車椅子）のバックサポートフレームに取り付けて使用します。取り付ける座位保持装置や車椅子の材質（金属製、木製）や形状により、専門的な技術を要しますので専門業者による取り付けを推奨します。

4 取り付け方法

- 1 バックサポートフレームに取り付けます（3ヶ所以上）。取り付け面は平面である事を推奨します。
- 2 取り付け後、平ワッシャー、スプリングワッシャーの順でボルトに通し、袋ナットで締結します。

* 締結後、ガタツキや緩みがない事を確認します。
* 丸パイプなど取り付け面が曲面状のバックサポートフレームに取り付ける場合は、取り付け面を平面にするスペーサーをご準備、ご使用下さい。
不明な場合は販売元にお問い合わせ下さい。

5 角度調節方法

- 1 リリースボタンを矢印の方向に押し込みます。
- 2 リリースボタンを押したまま前腕サポート板を動かします。
- 3 お好みの角度に調節します。
- 4 リリースボタンの押さえを外し、リリースボタンが元の状態に戻った事を確認します。
- 5 リリースボタンが元の状態に戻らない場合、前腕サポート板を動かします。
- 6 「カチッ」と音がし、リリースボタンが元の状態に戻った事を確認します。

6 高さ調節方法

- 1 袋ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーを取り外します。
- 2 バックサポートフレームから取外し、お好みの高さに調節します。
- 3 取り付け後、平ワッシャー、スプリングワッシャーの順でボルトに通し、袋ナットで締結します。（3ヶ所以上）

* 締結後、ガタツキや緩みがない事を確認します。

7 前腕サポート板の取り付け角度調節方法

- 1 ボルト、スプリングワッシャー、平ワッシャーを取り外します。
- 2 3列ある取り付け穴の内、2列を使ってお好みの位置に調節します。
- 3 取り付け後、スプリングワッシャー、平ワッシャーの順にボルトに通し、締結します。

* 締結後、ガタツキや緩みがない事を確認します。

8 本体固定板の取り付け高さ調節方法（高さ調節域が不足した場合に行います。）

- 1 4本の皿小ねじを取り外します。
- 2 左右の本体固定板を反転させて入れ替えます。
- 3 4本の皿小ねじで締結します。

* 締結後、ガタツキや緩みがない事を確認します。