


コントローラー接続金具（専用オプション）


本製品は前腕サポート角度調節部品専用オプションです。電動車いすのコントローラーを使用する場合に取り付けます。専門的な技術を要しますので専門業者による取り付けを推奨します。

1 各部の名称

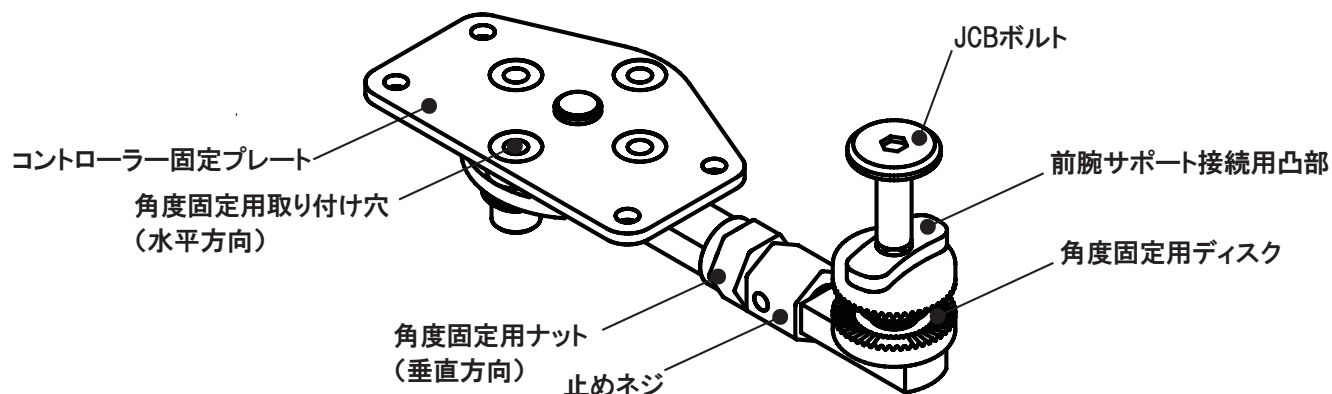


2 取り付け方法


- 1 JCB ボルトを取り外します。内部の皿ばねを落とさないように気をつけてください。

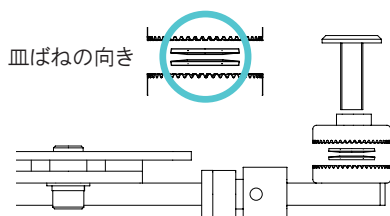


- 2 前腕サポート角度調節部品のオプション取り付け用スリットに、接続用凸部をはめ込みます。

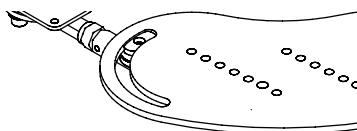


- 3 JCB ボルトで締結します。皿ばねの向きを間違わないようにしてください。

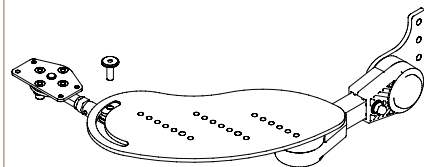


- 4 水平方向の角度調節は、角度固定用ディスクと固定プレートの取り付け穴（メネジ）を使って調節してください。

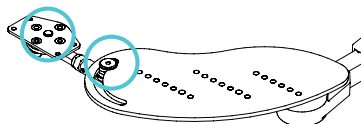

- 5 固定プレートの角度調節域が不足する場合は、使用していない取り付け穴にボルトを締め替えて調節してください。

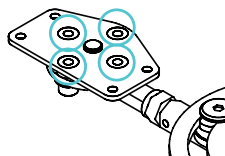

- 6 旋回方向の角度調節は、M8のナットを緩めて調節してください。調節後は、ナットと止めネジでしっかりと固定して下さい。

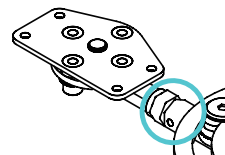

* 締結後、ガタツキや緩みがない事を確認します。

* 旋回部の緩みは操作中の事故につながる恐れがあります。M8 ナットと止めネジはしっかりと締結してください。