

TALKING AID™

クイック・リファレンス

～トーキングエイド for iPadシンボル入力版～



伝えたいことを作成する例
「僕ハンバーガー大好き」



発声キーにタッチすると、まとめて発声します。発声を途中で止める場合は、再度発声キーにタッチします。

文書画面消去



文書画面のシンボルを全て消去します。

1 シンボル消去



カーソルの左側1シンボルを消去します。

戻る



直前に行った操作を1回分戻すことができます。誤って消去した場合、もどるキーで消去したシンボルを復元できます。

表示されているカテゴリ変
更



カテゴリタブに直接タッチしてもカテゴリを変更することができます。

表示されているシンボルの
スクロール



次ページ

終了

シンボルラベルの変更・追加



ラベル名
入力



変更

シンボルと同時に表示されているラベルを異なるものに変更できません。あらかじめ、10個まで登録しておくことができます。また、シンボルラベルは、音声合成での読み上げ対象となります。
※ワイヤレススイッチボックス等の外付けキーボードが接続されている場合は、iPadのキーボードが表示されませんので、ご注意ください。

登録先カテゴリの変更



カテゴリ登録



変更

カテゴリは全部で10個あります。作成・変更した画像をお好きな1つのカテゴリに登録することができます。

カテゴリ名の変更



カテゴリ編集

カテゴリ名
入力

保存

変更

カテゴリ絵文字の変更



カテゴリ編集

変更する
絵文字に
タッチ

絵文字
一覧から
選択

保存

変更

シンボルに録音音声に登録



録音開始

録音

録音停止

ラベル名
入力

ラベル登録



変更

 キーの同時押しを意味します

前ページ

次ページ

終了

絵文字で新しいキーを作る



絵文字

絵文字
一覧から
選択

ラベル名
入力

ラベル登録



登録

保存済み画像で新しいキーを作る



カメラロール

カメラロール
から
選択する

使用

ラベル名
入力

ラベル登録



登録

カメラで撮影して新しいキーを作る



今撮影する

カメラで
撮影する

使用

ラベル名
入力

ラベル登録



登録

シンボルキーにロックをかける



キーロック

変更

機能キーにロックをかける



キーロック

完了




キーの同時押しを意味します

前ページ

次ページ

終了

補助機能画面を呼び出す

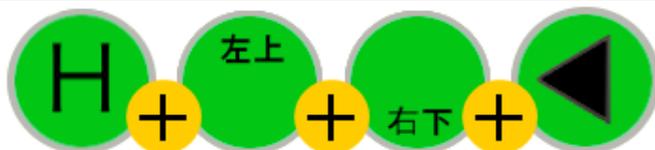

さまざまな補助機能を利用するための画面を呼び出します。誤って設定変更されないようにするため、四隅の4つのキーの同時押しとしています。

音量を調節する



iPad本体の音量が低いと、トーキングエイドの音量を上げても大きくなりません。iPad本体の音量を最大にしてご使用することをお勧めします。

シンボルキーをタッチした時に発声させる



文字キーをタッチすることにより、発声します。文字キー以外はクリック音が鳴ります。

キーをタッチした時にクリック音だけにする。




キーをタッチしても発声されず、「ピッ」というクリック音のみ鳴ります。発声キーをタッチした時に、文書画面の内容を読み上げます。利用者がキー入力中に相手に先読みされることを防ぐ便利な機能です。

キーをタッチした時に音声で案内する。



発声キーを除くすべてのキーを音声で案内します。

音声の種類を変更

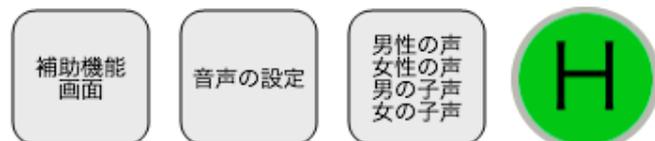

4種類の音声合成が内蔵されています。さらに、声の高さや話す速度を変更して、お好みの声色に設定することができます。

 キーの同時押しを意味します

前ページ

次ページ

終了

個人の設定をリセット

補助機能
画面

リセット

個人の
設定を
リセットパスコード
入力

リセットする

ここで初期設定にリセットされるのは、「ミュート」「音量」「無効時間」「保持時間」の4つの機能です。「音が聞こえない」、「キーの反応が悪い」など、故障ではなくこれらが設定されているからかもしれません。

シンボル設定をリセット

補助機能
画面

リセット

シンボル
設定を
リセットパスコード
入力

リセットする

シンボル設定をお買い上げ時の状態に戻します。

すべての設定をリセット

補助機能
画面

リセット

すべての
設定を
リセットパスコード
入力

リセットする

すべての設定をお買い上げ時の状態に戻します。

前ページ

次ページ

終了

支援者用設定画面を表示させるには



TAシンボル
にタッチ

支援者が利用者の状態に合わせて、アプリの動作を定義することができます。そのための設定画面です。iPad自身の「設定」に、本アプリの設定画面があります。

キーガードを付けた状態で
ロック解除を行うには

支援者用
設定画面

回転の固定

オン

ホーム
ボタン

ホームボタンを右にした状態の表示を保持します。キーガードを利用する場合はこの状態でセットし、ホームボタンが左側に来る状態でiPadの画面の向きをロックすれば、キーガードの文書画面の開口部で起動時のロック解除が出来ます。

シンボルの変更を禁止する
には

支援者用
設定画面

シンボル設定

オフ

ホーム
ボタン

シンボルの追加や変更を禁止する場合には「オフ」にします。「オン」にするとシンボルの編集ができます。

指に震えがある等で何度も
キーをタッチしてしまう場
合には

支援者用
設定画面

無効時間

なし
0.9秒

ホーム
ボタン

設定した時間の間に、何度タッチしても1回しか入力を受け付けません。手指の動きに小刻みな震えがあるために、何度も同じキーをタッチして誤入力を引き起こしている場合に有効です。

不用意に目的以外のキーを
タッチしてしまう場合

支援者用
設定画面

保持時間

なし
3.0秒

ホーム
ボタン

設定した時間の間、タッチし続けないと入力を受け付けません。キーボード上を指を滑らせたり、目的のキーに隣接するキーにも触れてしまって、誤入力を招いている場合に有効です。

キーロックの機能を使わな
いようにする場合

支援者用
設定画面

キーロック

オフ

ホーム
ボタン

アプリ稼働中に設定できる「キーロック」を許可するかどうかを設定できます。

前ページ

次ページ

終了

絵文字を使わずに、オリジナル画像のキーボードを作成したい

支援者用
設定画面

絵文字利用

オフ

ホーム
ボタン

お手持ちのシンボルや画像をつかって、白紙の状態からキーボードを作成したい場合に、便利な設定です。
初期状態で設定されている絵文字を非表示にします。（解除されるわけではありません）

キーボードのキーの分割数を変更したい

支援者用
設定画面

シンボルキー
表示数

1画面/
32画面/

ホーム
ボタン

「1」「2」「4」「8」「32」から選ぶことができます。
利用者が最も理解しやすい数に固定することができます。
キーロックの機能とカテゴリ登録機能を組み合わせると、とてもシンプルなキーボードが作成できます。

リセットを行う場合のパスワードを設定するには

支援者用
設定画面

リセット
パスコード

パスコード
入力

ホーム
ボタン

各種設定をリセットする際に必要な4桁のパスワードを設定します。

前ページ

終了