



Case : 106


つり具を抜こうとして、前方へ落ちそうになる


場面の説明

利用者がずっこけ姿勢の状態、介助者が斜め前方からつり具を強引に抜こうとしたため、利用者もろとも動いてしまった

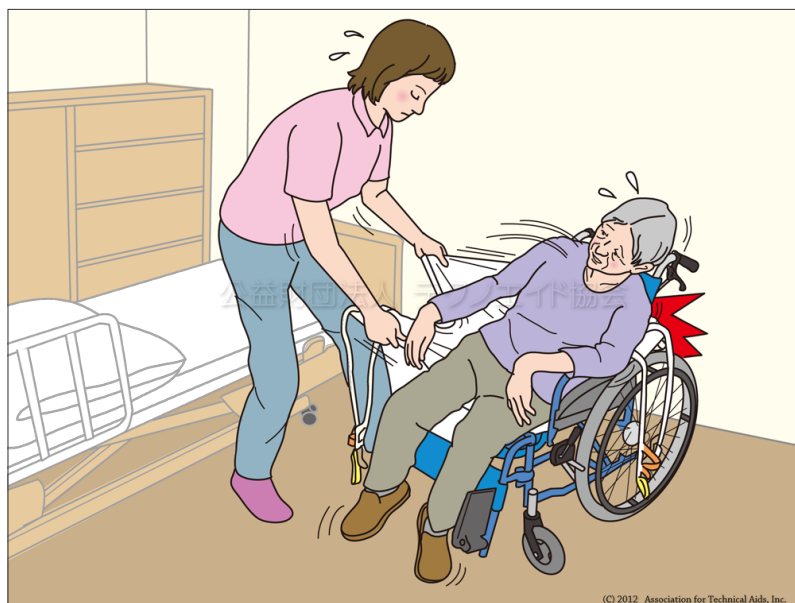

利用シーン  移乗

主な利用場所  寝室

介護保険の種目  移動用リフト（つり具の部分）

分類コード (CCTA95) 123621(吊り上げ式リフト用吊具)

介護テクノロジー -

二次元バーコード



解説

つり具を正しく使用し、適切な操作方法で移乗すればこのようなことは起こりません。適切なつり具を選定し正しい操作方法を習得しましょう。自己流にならず手順通りに実施することを心がけてください。

参考要因

- 人：つり具を斜めから強引に引き抜いた
- 人：リフト移乗の正しい使用方法を教わっていなかった
- 管理：正しい操作方法を伝える研修機会が確保されていなかった