


Case : 115

## ベッドの柵（サイドレール）に手押しハンドルが引っかかり、動けなくなる

### 場面の説明

ベッド付近で車いすの方向転換をした際に、手押しハンドルがベッドの柵（サイドレール）に引っかかって動けなくなってしまった

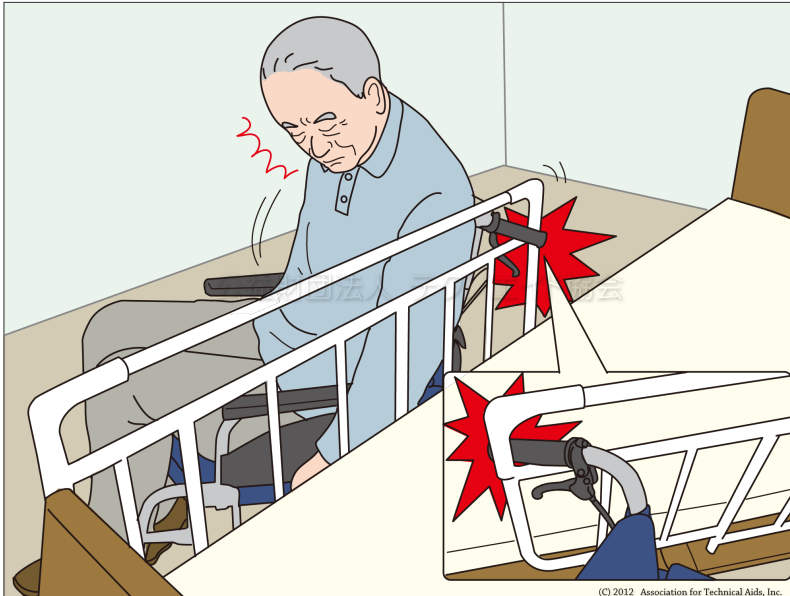

利用シーン

移動

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

特殊寝台付属品

分類コード(CCTA95)

181227(ベッド用サイドレール、  
ベッド固定式起き上がり手すり)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



### 解説

ベッドの高さや車いすの形状などの条件が、悪い状況で重なることで起こってしまう事例です。車いすをこぐことで簡単に脱出できることもありますが、強固に挟まってしまい抜け出すことが困難な場合もあります。製品の組み合わせによっては、このような事例が発生する場合がありますので、一度確認しておく方が良いのではないのでしょうか。

### 参考要因

人：介助ハンドルが引っかかることを認識していなかった

人：狭い空間で方向転換をした

環境：方向転換をするための十分な場所がなかった