


Case : 117

前向きで下りたところフットサポートが地面に引っかかり、転落しそうになる

場面の説明

前向きで下りたため、フットサポートが地面にぶつかってしまった

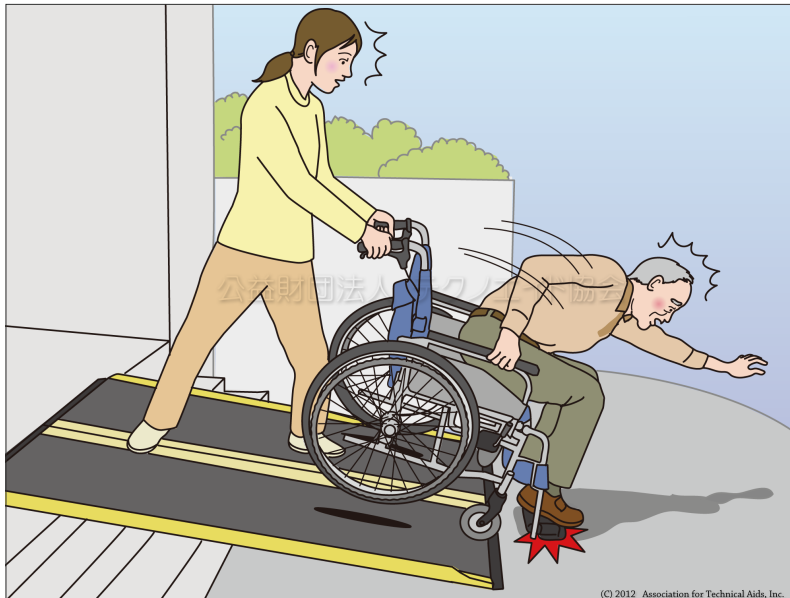

利用シーン

移動
階段の昇り降り
外出

主な利用場所

階段
玄関
段差・縁石

介護保険の種目

スロープ

分類コード (CCTA95) 183015(携帯用スロープ)

介護テクノロジー

—

二次元バーコード



解説

スロープを下りるときには、車いすを後向きに介助することが基本です。それは万が一このような事象が起これば、利用者が転落することを防げるという観点からです。どうしても前向きに介助したい場合は、フットサポート下の隙間が路面に干渉しないことを確認しましょう。

参考要因

人：正しい介助方法を理解していなかった
モノ：フットサポートが低い位置にある車いすだった
管理：ねじのゆるみからフットサポートが下がっていた