福祉用具ヒヤリハット情報

Case: 132

片側のフットサポートに足をのせて立ち上がり、車いすが傾いて転倒しそうになる

場面の説明

うっかり片側の足をフットサポートに乗せたまま立ち上がってしまい、車いすが斜めに傾いてしまった



解説

フットサポートの上に立ってしまう、体重をかけてしまうことで車いすが傾き転倒につながる事例は多く報告されています。立ち上がりの際には、必ずフットサポートを跳ね上げ、足を床について行うことを習慣化するよう、日常の声かけなどから注意することが大切です。

参考要因

人:フットサポートから足を下ろすのを忘れていた

環境:フットプレートの上に立ってしまうことの危険性を指摘してくれる人がいなかった