


福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 137

移乗時にブレーキレバーが引っかかり、転倒しそうになる

場面の説明

利用者の臀部がブレーキレバーを越えられずに引っかかってしまい、転倒しそうになった

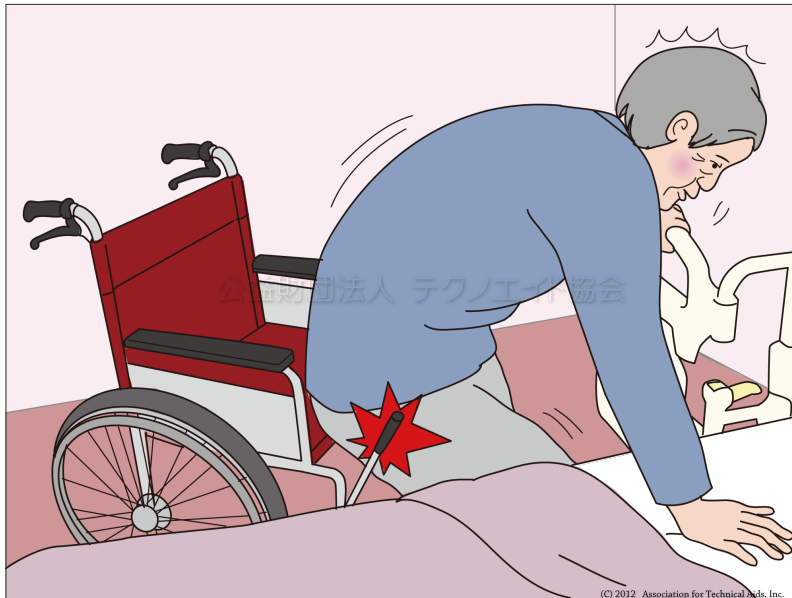

利用シーン

移乗

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

車いす

分類コード (CCTA95) 122106(後輪駆動式車いす)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

移乗をしやすくする工夫として、車いすの肘掛けが跳ね上がる製品がありますが、そのような車いすでもブレーキレバーの先端が邪魔になる場合があります。しっかりとした立位が取れない利用者の移乗では、先端が臀部に引っかかり、バランスを崩したり皮膚を損傷させる原因になりますので、小さなことと軽視せず、適切な車いすを選定しましょう。

参考要因

人：ブレーキレバーが引っかかると思わなかった
人：立位移乗するには不向きな車いすを提供していた
モノ：ブレーキレバーが長すぎた