


Case : 146

## ブレーキの効きが左右で違い、車いすが回転して投げ出されそうになる

### 場面の説明

左右同時にブレーキをかけたが、左側のブレーキが効いておらず、車体が右に回転してしまった

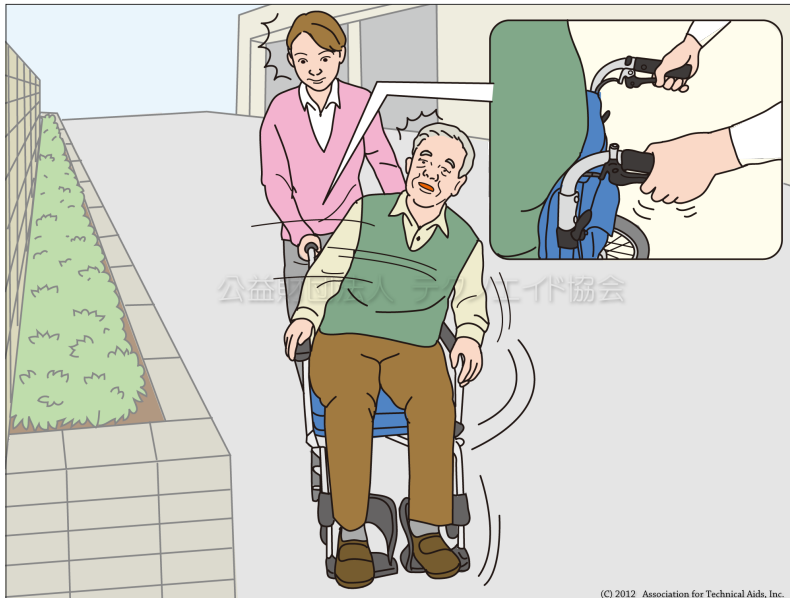

利用シーン

移動  
外出

主な利用場所

坂道

介護保険の種目

車いす

分類コード (CCTA95) 122103(介助用車いす)

介護テクノロジー

—

二次元バーコード



### 解説

多くの車いすは左右別々のブレーキを備えており、まっすぐに止まるには左右を均等に握ることが基本です。しかし、ブレーキの調整がきちんとされていない場合は、この事例のようにブレーキ操作が進行方向を乱してしまうことがあります。ブレーキはタイヤの空気圧も影響し、日ごろのメンテナンスが重要です。

### 参考要因

人：左右違う力でブレーキをかけた  
人：不具合に気づいていたがブレーキ調整ができなかった  
環境：傾斜がついている場所だった  
管理：定期メンテナンスをしていなかった