


Case : 148

アームサポートが倒れてしまい、転落しそうになる

場面の説明

アームサポートがしっかり固定されていなかったため落ちてしまい、転落しそうになった

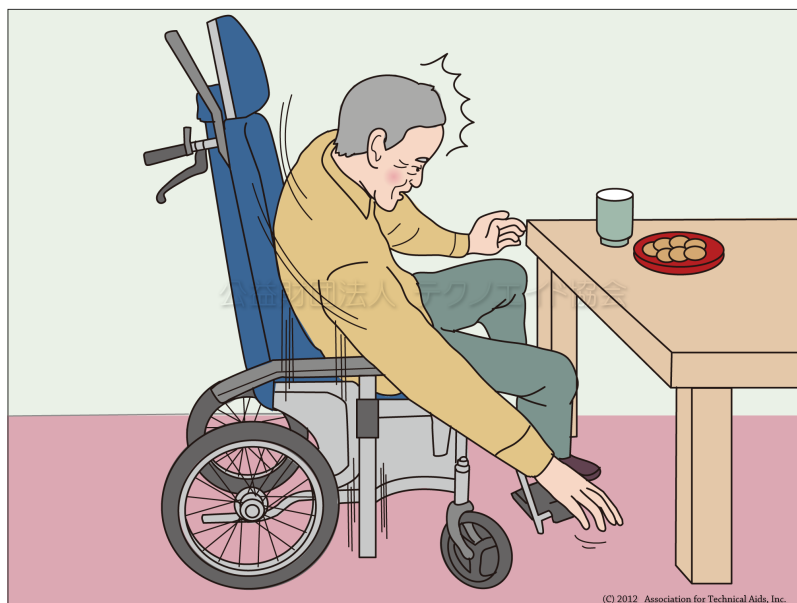

利用シーン

📌 その他

主な利用場所

🏠 リビング・居間
🍽️ ダイニング・食堂

介護保険の種目

🚗 車いす

分類コード (CCTA95)

122190(姿勢変換機能付き車いす)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

移乗の妨げにならないよう多くの車いすで肘掛けが収納または取り外し可能になっていますが、その方式は様々です。収納式の場合では使用する位置でロックがかかる機構になっていますが、この事例ではそのロックが不完全であった、またはロック機構自体が壊れていたのかもしれませんが。確実な操作とメンテナンスが求められます。

参考要因

人：ロックがかかっていることを確認していなかった
管理：定期メンテナンスをしておらず、故障箇所を見落としていた