


Case : 153

勢いよく座ったことで車体が傾き、ひっくり返りそうになる

場面の説明

ブレーキがかかっていたが、勢いよく座ってしまったことで車体が傾いてしまった

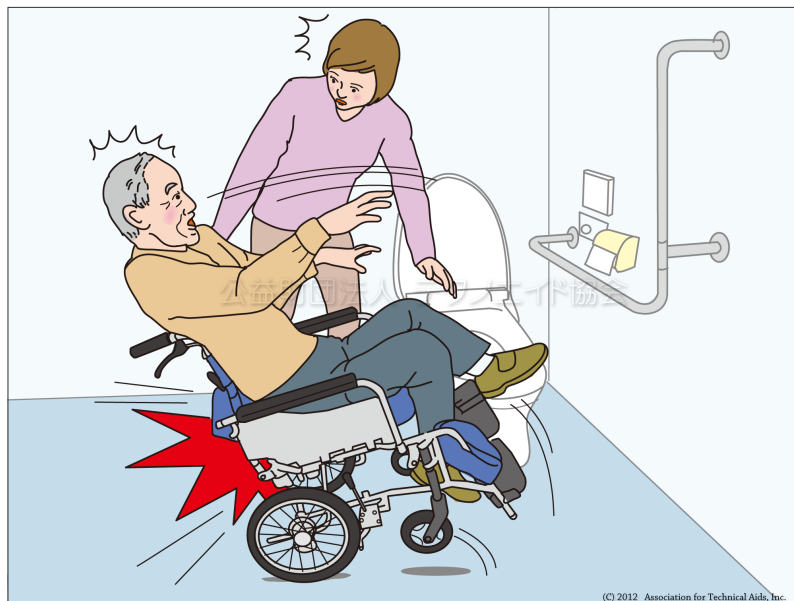

利用シーン

移乗
立ち座り

主な利用場所

寝室
リビング・居間
ダイニング・食堂
トイレ

介護保険の種目

車いす

分類コード (CCTA95) 122103(介助用車いす)

介護テクノロジー

—

二次元バーコード



解説

例えばブレーキをかけていても、勢いよく座ると後方へ転倒する危険があります。車いすに座るときにはゆっくりと動作することが基本ではありますが、障害によっては、手すりから手を離すタイミングが合わずにゆっくりとした動作が困難な場合もあります。車いすの安定性は機種ごとに異なりますので、必要に応じて安定性の高い車いすを選定しましょう。

参考要因

人：ブレーキがかかっていることに安心してしまった
人：後方に倒れるかもしれないという危険予測をしていなかった
モノ：比較的ひっくり返り易いコンパクトタイプの車いすだった
環境：移乗に必要な手すりを使用しなかった