


Case : 157

誤ってジョイスティックを触ってしまい、転倒しそうになる

場面の説明

電源スイッチを切らずにベッドに移乗しようとして、臀部がジョイスティックに接触し、車いすが動いてしまった

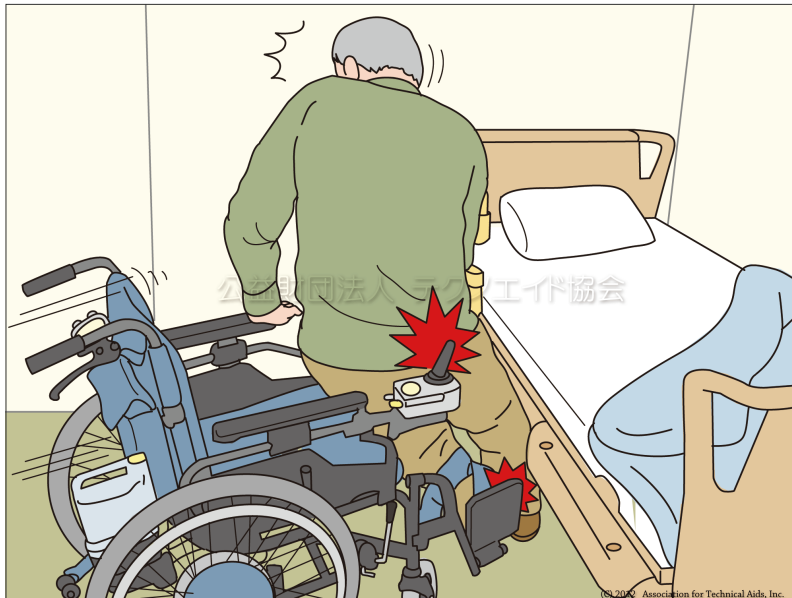

利用シーン

移乗

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

車いす

分類コード (CCTA95) 122127 (電動車いす)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

電動車いすのジョイスティックは軽い力で反応するので、移乗の時は必ず電源を切り、ブレーキのロックをかける安全操作が重要となります。この事例では、安全操作が行われず、移乗動作を行ったため、臀部がジョイスティックに接触してしまいました。介助での移乗であっても同じリスクは生じるので、介助者も安全操作の確認が必要です。

参考要因

- 人：電源スイッチを切り忘れて移乗しようとした
- 人：ブレーキをかけ忘れていた
- モノ：ジョイスティックが、臀部に接触しやすい位置にあった