


Case : 185


## 運搬のためボードを持とうとしたところ、外れて転倒しそうになる


### 場面の説明

ベッドを動かそうとして、ボードをつかんで持ち上げようとしたところ、ボードが抜けてしまい転倒しそうになった

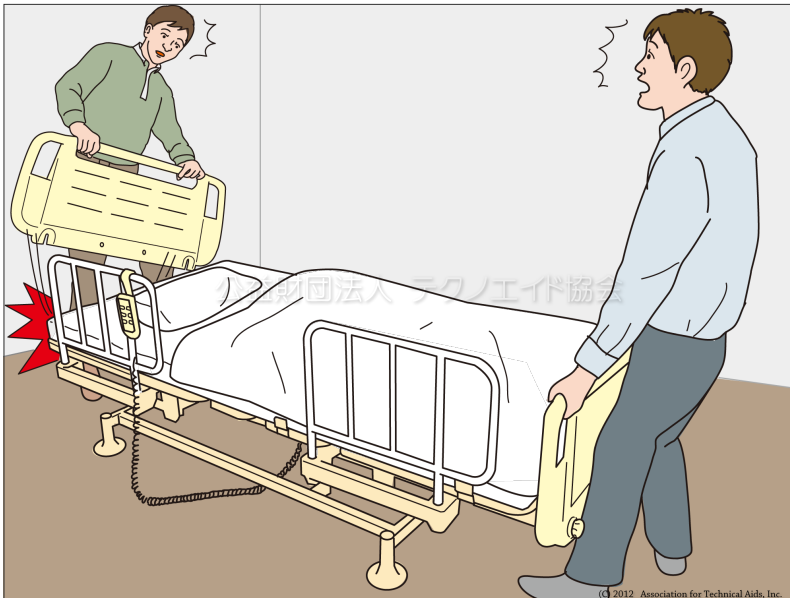

利用シーン  その他

主な利用場所  その他

介護保険の種目  特殊寝台

分類コード(CCTA95) 181209(電動ギャッチベッド)

介護テクノロジー -

二次元バーコード



### 解説

多くのベッドでは、洗髪などの目的でヘッドボードやフットボードが簡単に取り外せるような構造になっています。ベッドを熟知した人であれば、運搬前にロックを確認するなど安全を確保するでしょうが、在宅では家族がベッドを移動する場面もありますので、注意を喚起することが大切です。

### 参考要因

人：ベッドの正しい運搬方法を理解していなかった  
管理：ボードがしっかりと固定されていなかった