


## 福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 185

運搬のためボードを持つとしたところ、外れて転倒しそうになる

### 場面の説明

ベッドを動かそうとして、ボードをつかんで持ち上げようとしたところ、ボードが抜けてしまい転倒しそうになった

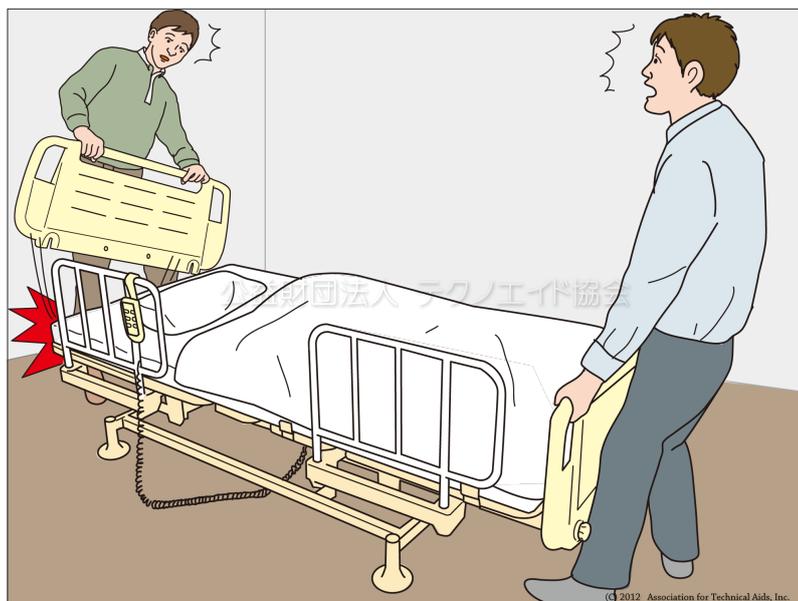

利用シーン

🏠 その他

主な利用場所

🏠 その他

介護保険の種目

🏠 特殊寝台

分類コード(CCTA95) 181209(電動ギャッチベッド)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



### 解説

多くのベッドでは、洗髪などの目的でヘッドボードやフットボードが簡単に取り外せるような構造になっています。ベッドを熟知した人であれば、運搬前にロックを確認するなど安全を確保するでしょうが、在宅では家族がベッドを移動する場面もありますので、注意を喚起することが大切です。

### 参考要因

人：ベッドの正しい運搬方法を理解していなかった

管理：ボードがしっかりと固定されていなかった