


## 福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 203

寝返りさせたところ、顔がベッドの柵（サイドレール）にぶつかってしまいケガをしそうになる

### 場面の説明

寝返りさせることに気を取られ、状況を確認せずに寝返りさせてしまい、利用者の顔がベッドの柵（サイドレール）にぶつかってしまった

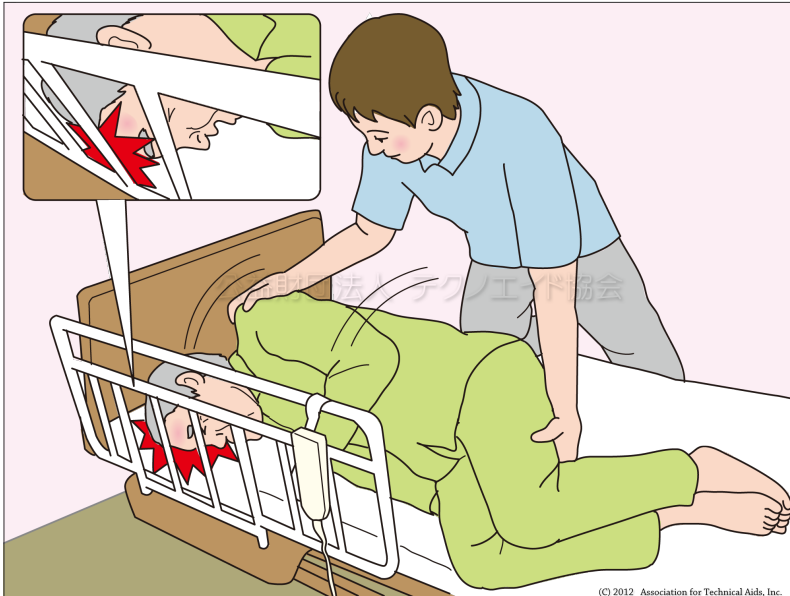

利用シーン

起居・就寝  
移乗

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

特殊寝台付属品

分類コード (CCTA95)

181227(ベッド用サイドレール,  
ベッド固定式起き上がり手すり)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



### 解説

介助者の不注意が大きな要因ではありますが、ベッドの幅にも注目してください。介護用のベッドは一般のベッドよりも幅が狭く、寝返りをさせる前に寝位置をずらすなど介護の手間もかかります。部屋が狭いなどの理由で幅の狭いベッドを選ぶ時がありますが、このような短所も理解した上で、総合的に判断して適切なものを選定しましょう。

### 参考要因

人：目測を見誤った  
人：介助方法が雑だった  
モノ：介護用のベッドは幅が狭い