


福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 212

ホースがベッドの柵（サイドレール）とベッドの隙間に挟まり、空気が流れなくなる

場面の説明

ポンプとエアマットをつなぐホースがベッドとベッドの柵（サイドレール）の間に挟まっており、空気の流れが悪くなっていた

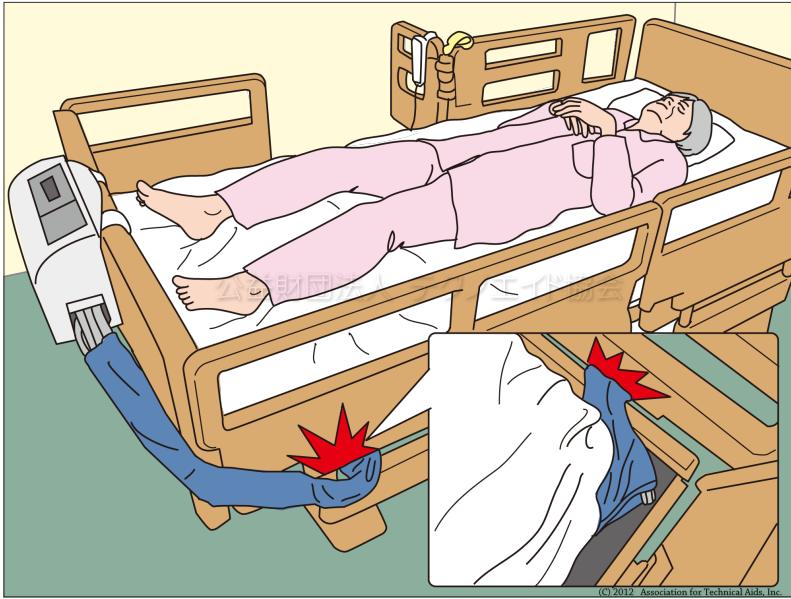

利用シーン

🏠 起居・就寝

主な利用場所

🏠 寝室

介護保険の種目

🏠 床ずれ防止用具

分類コード (CCTA95)

033309 (特殊な褥瘡予防装置)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

エアマットはホースによってポンプとつながれており、その空気の流路が遮断されると、エアマット本来の性能を発揮できません。ホースの経路は、ベッドを静止させている時だけではなく、膝上げや高さ調節の動作を行なったうえで、挟み込みなどに注意して決定しましょう。

参考要因

人：ホースを挟み込むようなかたちでベッドの柵（サイドレール）を取り付けた
管理：ホースの取り回しを日常的に確認していなかった