


福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 215

ホースが折れ曲がっており、空気が流れなくなる

場面の説明

ポンプとマットをつなぐホースが途中で折れ曲がっていたため、空気が流れなくなっていた

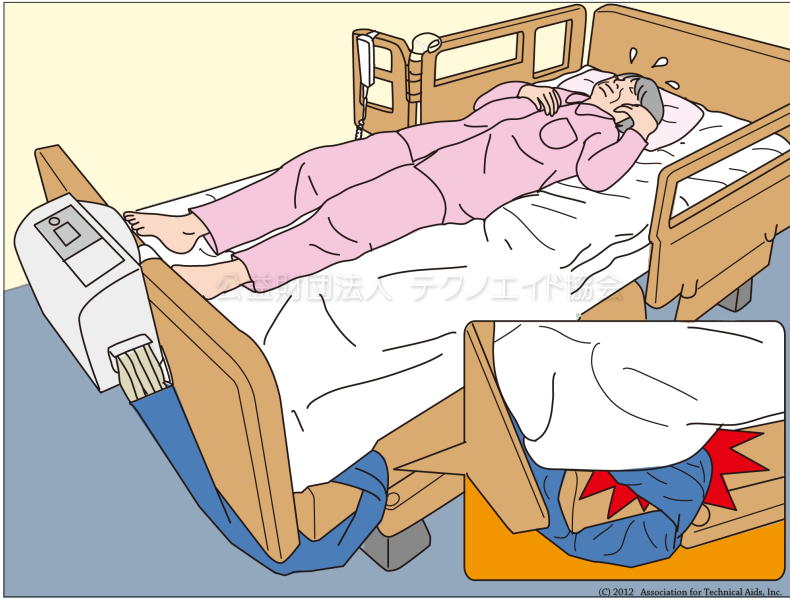

利用シーン

🏠 起居・就寝

主な利用場所

🏠 寝室

介護保険の種目

🏠 床ずれ防止用具

分類コード (CCTA95)

033309 (特殊な褥瘡予防装置)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

この事例では、エアマットの取り扱いに不慣れな家族がシーツを交換した際に、ホースをシーツに巻き込んでしまったことが原因と報告されています。納品した事業者も、シーツ交換の際の注意事項を説明していなかったようです。福祉用具は、ほとんどの家族にとって初めて利用する道具です。スイッチなどの操作方法だけでなく、実際に使用する様々な場面を想定しての説明が求められます。

参考要因

人：シーツ交換の際、ホースをいっしょに巻き込んでしまった
管理：ホースの取り回しを日常的に確認していなかった