
福祉用具ヒヤリハット情報

Case: 231

床面がカーペットに変わったことでキャスタがうまく回転せず、転倒しそうになる

場面の説明

床面がカーペットに変わったことで、キャスタがスムーズに回らなくなり、転倒しそうになった

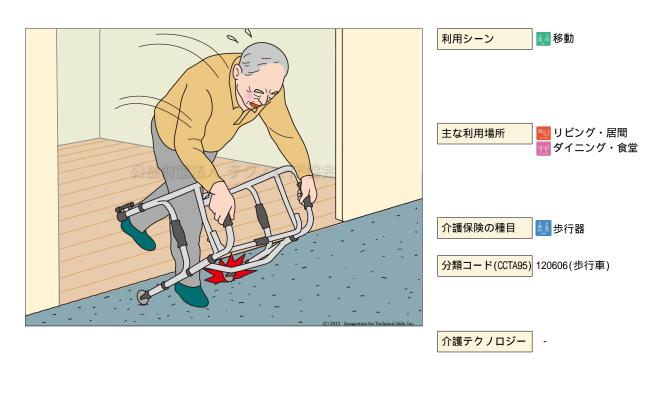

二次元バーコード



解説

床面の材質によりキャスタの転がりに対する抵抗が異なりますので、材質の変わり目を通過する際には注意が必要です。急に抵抗が大きくなって前方へバランスを崩すほか、急に抵抗が小さくなって歩行車のみが前方へ勢いを増してしまうなどの危険が想定されています。

参考要因

人:床面が変わったのを確認していなかった

人:キャスタの回転速度の変化に身体が順応しなかった モノ:床面が変わってキャスタに対する摩擦力が増えた