


Case : 231

床面がカーペットに変わったことでキャストがうまく回転せず、転倒しそうになる

場面の説明

床面がカーペットに変わったことで、キャストがスムーズに回らなくなり、転倒しそうになった

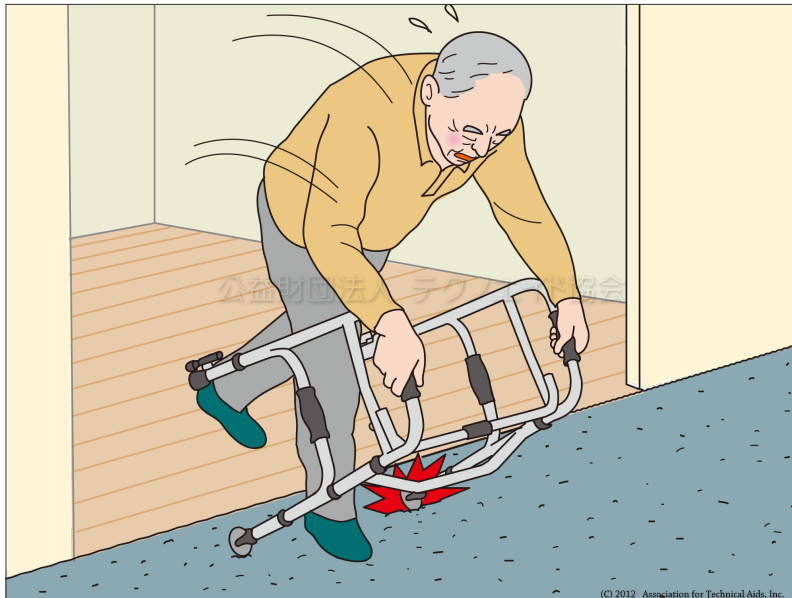

利用シーン

移動

主な利用場所

リビング・居間
ダイニング・食堂

介護保険の種目

歩行器

分類コード(CCTA95) 120606(歩行車)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

床面の材質によりキャストの転がりに対する抵抗が異なりますので、材質の変わり目を通過する際には注意が必要です。急に抵抗が大きくなって前方へバランスを崩すほか、急に抵抗が小さくなって歩行車のみが前方へ勢いを増してしまうなどの危険が想定されています。

参考要因

人：床面が変わったのを確認していなかった
人：キャストの回転速度の変化に身体が順応しなかった
モノ：床面が変わってキャストに対する摩擦力が増えた