


## 福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 237

脚部が誤って装着されており、バランスを崩して転倒しそうになる

### 場面の説明

脚の高さ調節をする押しボタンがロックされており、加重をかけた際に脚が下がってしまい、転倒しそうになった

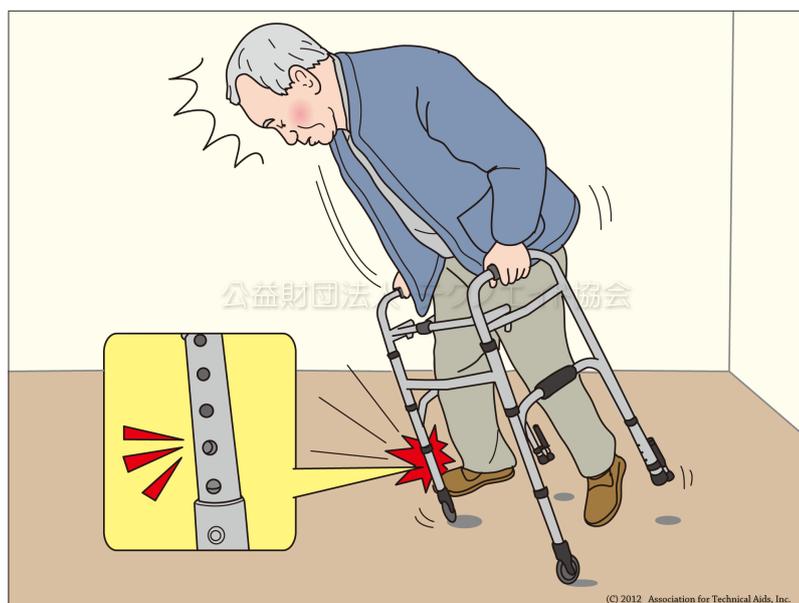

利用シーン

移動

主な利用場所

その他

介護保険の種目

歩行器

分類コード (CCTA95)

120606 (歩行車)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



### 解説

歩行車の高さ調節については、基本的には提供した専門家が利用者の身体と適合させるものです。何らかの都合で高さを再調整したり、脚部を組み替えたりする際には、正しい組み合わせと高さに注意しましょう。

### 参考要因

人：高さ調節をした後、ロックがかかっているかの確認を怠った  
モノ：障害物にぶつかるなどして、押しボタンが押し込まれていた