
福祉用具ヒヤリハット情報

Case: 243

片側のハンドルが急に下がり、転倒しそうになる

場面の説明

片側のハンドルが急に下がったため、バランスを崩して転倒しそうになった

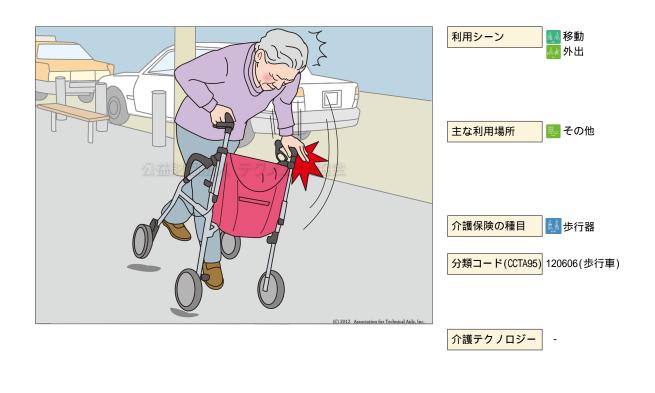

解説

なぜハンドルの高さが変わってしまったのでしょうか。普段の使用で固定ねじがゆるみ、片方が下がってしまったのかもしれません。このようなことがないよう日常のメンテナンスは重要ですが、利用者がそのメンテナンスを行えない場合が多くありますので、家族などの協力もえて安全を確保する体制づくりも大切です。

二次元バーコード

参考要因

人:ハンドルの高さが合っていないことに気づかなかった

人:ねじのゆるみに気がつかなかった

モノ: 左右でハンドルの高さが変えられる歩行車だった

管理: 定期メンテナンスをしていなかった