

Case : 243

### 片側のハンドルが急に下がり、転倒しそうになる

#### 場面の説明

片側のハンドルが急に下がったため、バランスを崩して転倒しそうになった



利用シーン

移動  
外出

主な利用場所

その他

介護保険の種目

歩行器

分類コード (CCTA95) 120606 (歩行車)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



#### 解説

なぜハンドルの高さが変わってしまったのでしょうか。普段の使用で固定ねじがゆるみ、片方が下がってしまったのかもしれません。このようなことがないように日常のメンテナンスは重要ですが、利用者がそのメンテナンスを行えない場合が多くありますので、家族などの協力もえて安全を確保する体制づくりも大切です。

#### 参考要因

人：ハンドルの高さが合っていないことに気づかなかった  
人：ねじのゆるみに気がつかなかった  
モノ：左右でハンドルの高さが変えられる歩行車だった  
管理：定期メンテナンスをしていなかった