


福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 276

方向転換をしたときに本体が外れてしまい、溺れそうになる

場面の説明

バスボード上で方向転換したところ、加重で浴槽縁からバスボードが外れてしまい、バランスを崩した

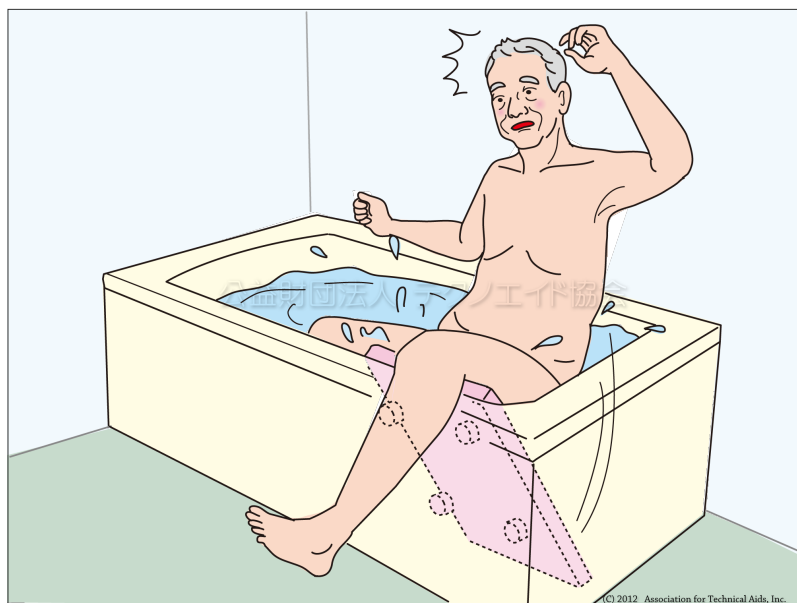

利用シーン

入浴

主な利用場所

浴室・脱衣所

介護保険の種目

入浴補助用具

分類コード (CCTA95) 093303 (入浴用チェア)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

身体の方角転換をただでバスボード本体が外れてしまうようであれば、浴槽と合わせる調整に不備があったか、もしくは適合しない浴槽の形状であったことが考えられます。浴槽には様々な形状や大きさがあり、すべての浴槽にバスボードが適合するわけではありません。取扱説明書をよく理解し、無理な使用は控えるよう注意しましょう。

参考要因

人：浴槽にしっかりと固定していなかった
管理：浴槽に合わないバスボードを設置していた