

Case : 287


雨のため介助者の足がすべり、転倒しそうになる

場面の説明

雨のためスロープの路面がぬれており、介助者の足がすべってしまった



利用シーン

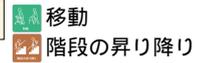

主な利用場所



介護保険の種目



分類コード (CCTA95) 183015 (携帯用スロープ)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

可搬形スロープの走行面にはすべり止めが施されていますが、雨天時などでぬれている時には十分な効果を発揮できません。また、スロープの長さが短く傾斜が急な時には、ぬれることによってより危険度が増すと考えられます。安全を確保する観点から、スロープの傾斜は余裕をもってゆるやかに設定し、またぬれている時などは使用を控えるなどの配慮が必要です。

参考要因

- 人：すべりやすい靴を履いていた
- 人：雨だったがどうしても外出しなけりばならなかった
- モノ：雨などでぬれるとすべり易くなる