


Case : 29


ベッド用グリップにパジャマが引っかかり、転倒しそうになる

場面の説明

ベッドから降りようとしたところ、大きく開いた袖口がベッド用グリップに引っかかりバランスを崩した

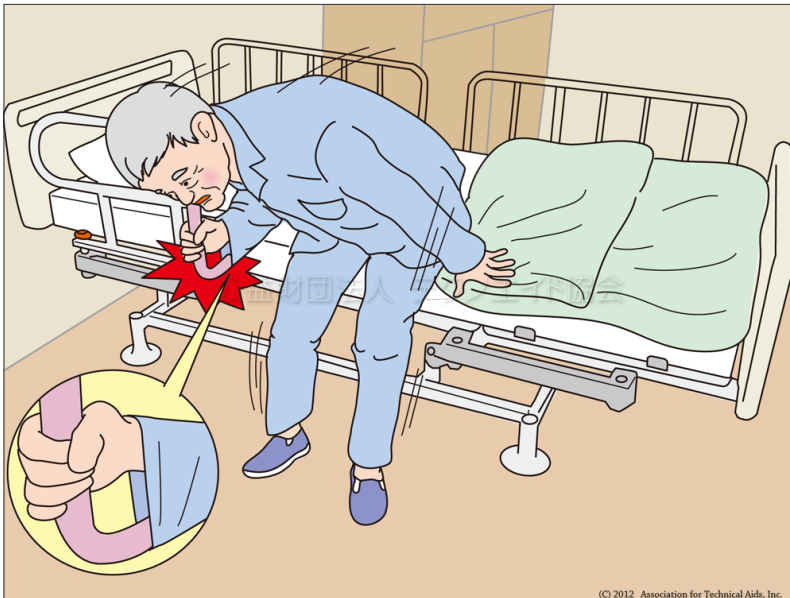


利用シーン

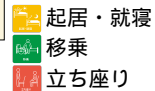

主な利用場所



介護保険の種目

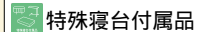

分類コード (CCTA95)

181227(ベッド用サイドレール、
ベッド固定式起き上がり手すり)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

袖口が引っかかり転倒する事例のほか、襟が引っかかって窒息する事故事例が報告されています。洋服を引っ掛けやすい突起がないかベッドやベッド用グリップを確認し、リスクとして認識することが重要です。新しいタイプのベッドやベッド用グリップではこの点の改善が進んでいるので、可能であれば機種の変更をお勧めします。

参考要因

人：袖口の広いパジャマを着ていた

モノ：ベッド用グリップが引っかかりやすい形だった

環境：このようなリスクに対して注意を喚起してくれる人が周囲にいなかった