


Case : 316

抑速ブレーキの左右調整が不一致で、直進性が損なわれる

場面の説明

抑速ブレーキ付の歩行器での歩行場面で、左右調整が不一致のため直進性が損なわれ、歩道から脱輪し転倒しそうになった

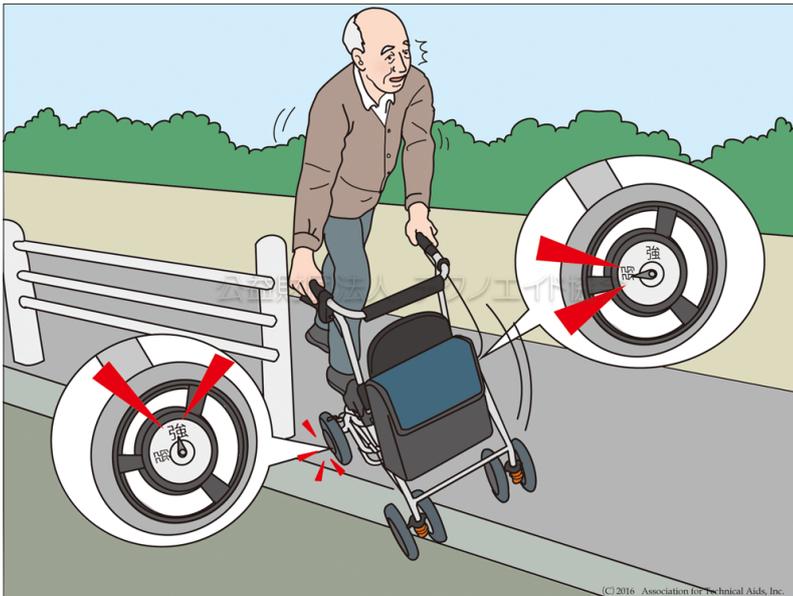

利用シーン

移動

主な利用場所

その他

介護保険の種目

歩行器

分類コード (CCTA95)

120606 (歩行車)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

抑速ブレーキ付の歩行器は、歩行が加速するパーキンソン症候群等の人に多く利用されますが、その抑速機構の調整ミスが原因です。

調整後は必ず直進性のチェックを行い、使用時のトラブルを未然に防ぐことが必須です。

参考要因

人：抑速ブレーキの調整を間違った

人：調整後、直進性の確認が不十分だった