


福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 317

無理な介助で移乗中に車いすのブレーキレバーにお尻を強打し、ブレーキレバーが曲がってしまう

場面の説明

ベッド・車いす間での無理な介助での移乗中に車いすの延長ブレーキがお尻がぶつかり、ブレーキレバーが曲がってしまった

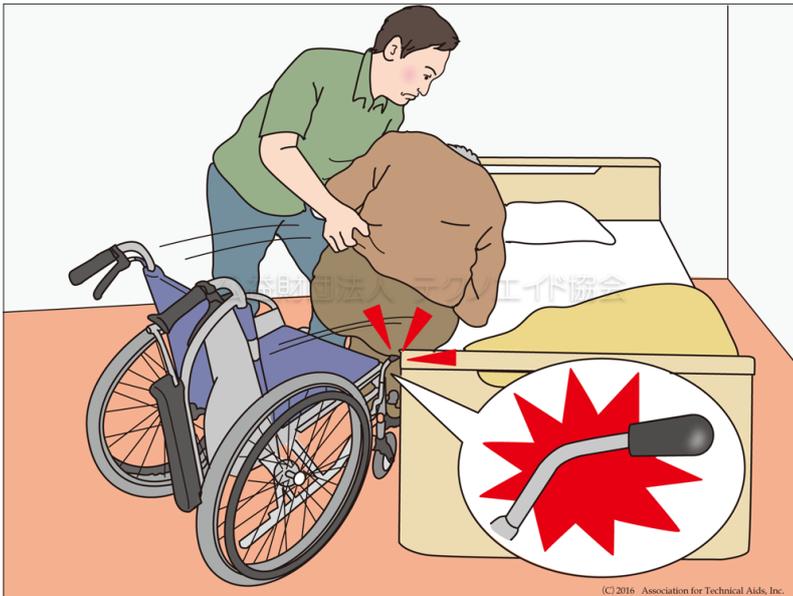

利用シーン

移乗

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

車いす

分類コード (CCTA95)

122106(後輪駆動式車いす)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

延長ブレーキを使っている場合に起こりやすいトラブルです。
車いす・ベッド間の移乗介助の方法やその際の車いすの準備に関して、再検討が必要です。

参考要因

人：力まかせに移乗させようとした
人：本人の身体機能から、そもそも持ち上げる介助方法が適切ではなかった
環境：介助者から延長ブレーキが見えにくかった