


福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 330

クッションにビニールでカバーをしていた為に、お尻がすべり、転落しそうになる

場面の説明

納品後の車いすクッションにビニールでカバーをしていた為に、お尻がすべり、転落しそうになった

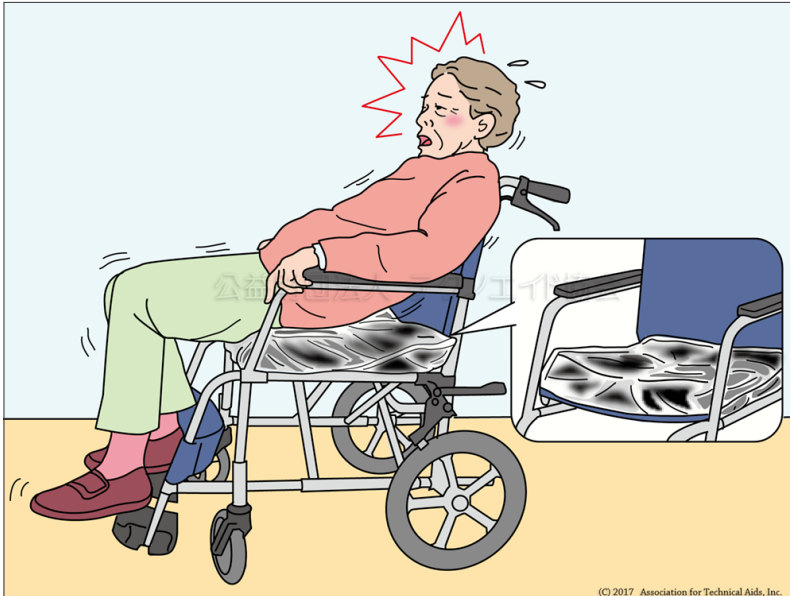

利用シーン

移動

主な利用場所

寝室
リビング・居間
ダイニング・食堂

介護保険の種目

車いす付属品

分類コード(CCTA95)

122406(シート(座)・背もたれ
・車いす用パッド・クッション)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

失禁で汚すことを気にして、納品後の車いすクッションにビニールでカバーをして使用する人がいます。しかし、ビニールの為にお尻がすべりやすく、ずり落ち転落の原因となるので、既定の使用方法を守るよう説明する必要があります。

参考要因

人：借物を汚してはいけないという気を使った
人：ビニールによるカバーが滑りやすいことを予測できなかった
モノ：ビニールでカバーをしていたので滑りやすくなっていた
管理：既定の使い方を使用者にきちんと理解してもらえていなかった