


福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 338

介助のために外していたサイドレールを、ベッドの下降操作により挟み込み、変形しそうになる

場面の説明

おむつ交換の介助の際、サイドレールを外して保管していた。
ケアが終わりベッドを下降させる際に挟んでしまい変形しそうになった。

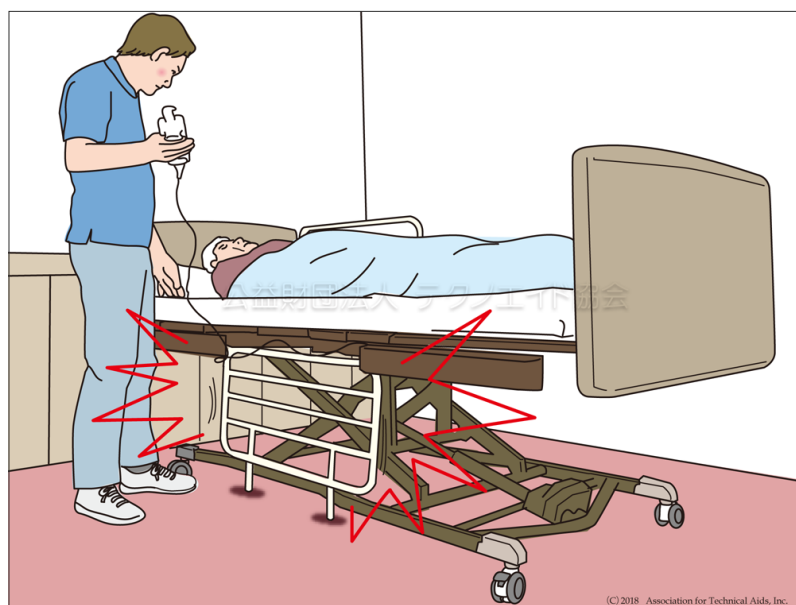

利用シーン

起居・就寝
リモコン操作

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

特殊寝台付属品

分類コード(CCTA95)

181227(ベッド用サイドレール,
ベッド固定式起き上がり手すり)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

介護者がベッドの高さを高くしておむつ交換等の介助をすることが良くあります。狭い部屋では、サイドレールを遠くに置けなかったり、誤ってゴミ箱や未使用のおむつがベッド下に収納されていることがあります。ベッド昇降の際は、挟み込みに注意しましょう。

参考要因

人：ベッドの下を確認せずにベッドを下げた
環境：部屋が狭く、ベッド下や横にモノを置かざる負えない状況があった
管理：ベッド下にベッド柵やゴミ箱等を置かない注意喚起や指導が不十分だった