

Case : 345

前輪固定のシルバーカーで方向転換の際、バランスを崩して転倒しそうになる

場面の説明

利用者宅廊下や屋外。
前輪キャスターを固定したままで使用中、横に曲がろうとしてシルバーカーごと向きを変えている最中にバランスを崩し転倒しそうになった。




利用シーン ■ 移動 ■ 外出

主な利用場所 ■ その他

介護保険の種目 -

分類コード (CCTA95) 120690(シルバーカー)

介護テクノロジー -

二次元バーコード 

解説

シルバーカーは福祉用具でなく、荷物運搬用の生活用具です。歩行が不安定になっている人へは、福祉用具の屋外用歩行器を選定する必要があります。但し、段階的に歩行機能が低下している高齢者の場合は、介護認定を受ける前から使っている場合が多いので、適切なアセスメントの上で、切り替えることも重要です。

参考要因

- 人：立位バランスが低下していた
- モノ：シルバーカーの前輪が固定されていた
- モノ：シルバーカーでなく、他の屋外用歩行器が適応だった
- 環境：シルバーカーの認知度が高い
- 管理：適切なアセスメントの上で、歩行器へ切り替えることが重要