

福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 346

ロフトランド杖のカフから腕が抜けず転倒しそうになる

場面の説明

冬場で厚手のコートを着用して歩行しようとした際、足がもつれ、カフから腕が抜けず、杖先が右脛の動作を妨げ転倒しそうになった。



利用シーン

移動
外出

主な利用場所

その他

介護保険の種目

歩行補助杖

分類コード (CCTA95)

120309 (ロフトランドクラッチ)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

ロフトランド杖の前腕カフの構造が、腕が抜けにくいタイプだったことや、冬場で服により腕が太くなっていったことによって起こりました。転倒時の危険性が高いため、腕が抜けにくいタイプは注意が必要です。旧式の円筒形型は販売禁止となっています。

参考要因

- 人：危険性を予見できていなかった
- モノ：前腕カフが腕が抜けにくいタイプだった
- 環境：冬で寒く、着ぶくれしていた
- 管理：腕が抜けにくいタイプは、転倒時に危険であるという注意喚起ができていなかった