


福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 349

スリングシート使用時に、誤って両腕を外に出していたため、けがしそうになる

場面の説明

腕を外に出すトイレ用と、中に入れるハイバックのスリングシートを使い分けていたが、使用方法を混乱してしまった。

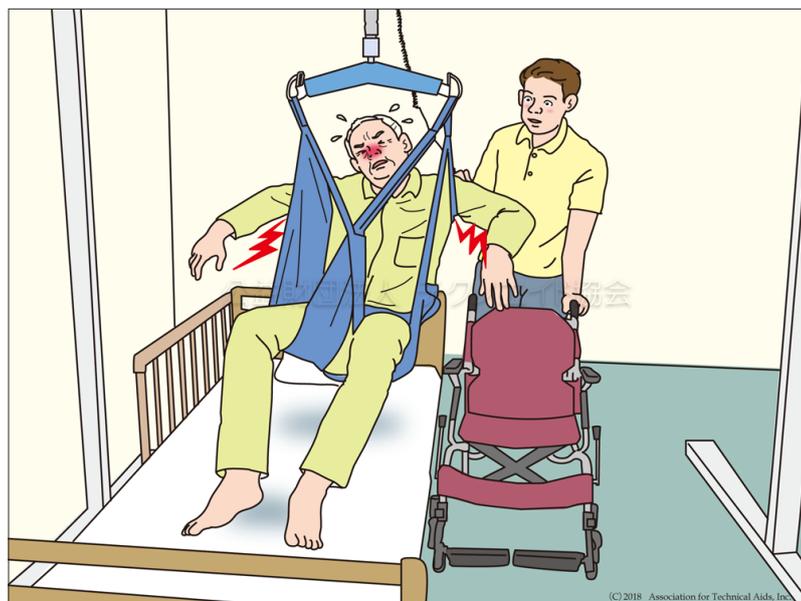

利用シーン

🚶 移乗

主な利用場所

🏠 寝室

介護保険の種目

🚶 移動用リフト（つり具の部分）

分類コード(CCTA95)

123621(吊り上げ式リフト用具)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

生活場面によってスリングシートを使い分けることがありますが、介護者が不慣れな場合、装着方法を間違えるといった初歩的なミスが起こります。事前に使用方法の実技研修をしっかりと行う必要があります。

参考要因

人：介護者が不慣れで誤った使用方法をとってしまった
人：本人が間違いを訴えることができなかった
モノ：スリングシートを2種類使っていた
環境：日常的にリフトを活用する施設だった
管理：研修体制に課題があった