

Case : 351

玄関掃除で床を濡らしたため、突っ張り型手すりがずれてしまう

場面の説明

玄関上り框の昇降補助として突っ張り型手すり土間に設置したが、家族が掃除の際に土間に水をまき、ずれやすくなっていた。



利用シーン

移動

主な利用場所

玄関

介護保険の種目

手すり

分類コード(CCTA95) 181806(握りバー, 握り)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

突っ張りがゆるむと外れることは取り付け時に説明しますが、玄関に水をまいて掃除することまで予測できなかったようです。床面が濡れ、摩擦が減ったことでずれやすくなっていたと考えられます。設置時の説明に土台が濡れるとずれることを加えましょう。

参考要因

- 人：玄関土間に水を撒いて掃除した
- 人：昇降時に手すりを引っ張った
- モノ：手すりの土台が濡れて滑りやすくなっていた
- 環境：滑りやすいタイル床だった
- 管理：水に濡れると土台が滑ることを伝えられていなかった