


Case : 36

手元スイッチのコードが断線し、ベッドが操作不能となる

場面の説明

床板の隙間にコードが入り込み引っかかってしまったが、無理やり引っ張ったために断線した

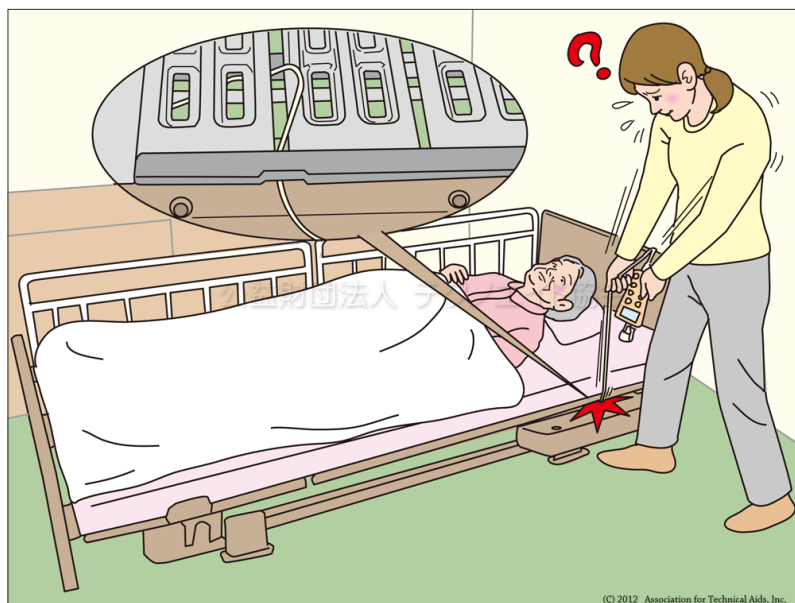

利用シーン

起居・就寝
リモコン操作

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

特殊寝台

分類コード (CCTA95) 181209 (電動ギャッチベッド)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

ベッドの故障原因の多くが断線に起因しています。手元スイッチのコードを正しく配線・固定することで防ぐことができるケースも多いので、普段の点検から注意しましょう。キャスト付きのベッドでは、手元スイッチのコードのほか、電源のコードの挟み込み・断線にも注意してください。

参考要因

人：断線の恐れがある箇所から丁寧にコードを外さなかった

モノ：手元スイッチのコードがベッド可動部の近くに入り込んでしまっていた