# 福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 36

## 手元スイッチのコードが断線し、ベッドが操作不能となる

#### 場面の説明

床板の隙間にコードが入り込み引っかかってしまったが、無理やり引っ張ったために断線した



### 解説

ベッドの故障原因の多くが断線に起因しています。手元スイッチのコードを正しく配線・固定することで防ぐことができるケースも多いので、普段の点検から注意しましょう。キャスタ付きのベッドでは、手元スイッチのコードのほか、電源のコードの挟み込み・断線にも注意してください。

#### 参考要因

人:断線の恐れがある箇所から丁寧にコードを外さなかった

モノ:手元スイッチのコードがベッド可動部の近くに入り込んでしまっていた