

福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 37

ベッドの柵（サイドレール）を差し込む穴に指を入れ、ケガをしそうになる

場面の説明

利用者の指がサイドレール受けの穴に入っているのに気づかず、利用者の体位を変えようとした



利用シーン

🏠 起居・就寝

主な利用場所

🏠 寝室

介護保険の種目

🏠 特殊寝台

分類コード(CCTA95) 181209(電動ギャッチベッド)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

まさかと思うような偶然から事故が起きることもあります。この事例も実際に起こっているヒヤリ・ハットです。ベッドの柵（サイドレール）が不要な人であればサイドレール受けを収納しておくなど対応することも可能です。介護場面では先例を把握し、それを安全に活かすことが重要です。

参考要因

人：利用者の指が穴に入ることを想定していなかった
人：介助する前に、腕や手の位置が安全な場所にあるか確認しなかった
モノ：ちょうど指が入りやすい位置に穴があった