


Case : 38


## マットレス止めが利用者の腿（もも）にあたり、ケガをしそうになる

### 場面の説明

マットレス止めが中央寄りに取り付けられていたため、ベッドで端座位になった際に、腿（もも）にあたった

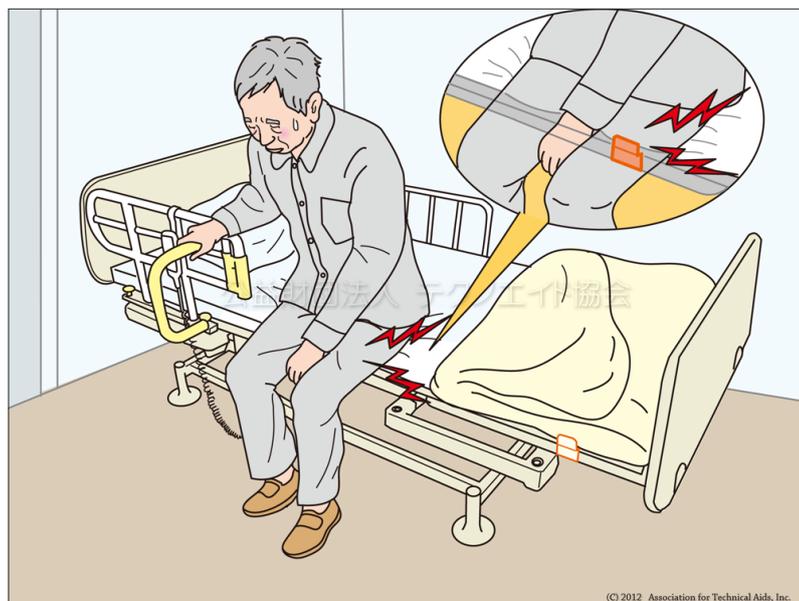


利用シーン

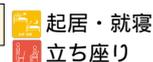

主な利用場所



介護保険の種目

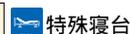

分類コード (CCTA95) 181209 (電動ギャッチベッド)

介護テクノロジー



二次元バーコード



### 解説

マットレス止めは正しく配置されていたのでしょうか？機種によっては、任意の位置に設置できるものもありますが、このようなことがないように配慮して設置すべきでしょう。またマットレスの厚さや硬さなどに起因することも考えられます。

### 参考要因

人：マットレス止めの位置を意識していなかった  
環境：不適切な位置にマットレス止めを配置してある