

福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 408

ロックが不十分だった座面が突然折りたたまれ、転落しそうになる

場面の説明

座面の固定ロックが十分にかかっていない状態に気が付かずに座ろうとして、突然折りたたまれ転落しそうになる



利用シーン

移動
外出

主な利用場所

その他

介護保険の種目

-

分類コード (CCTA95)

120690(シルバーカー)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

本来は構造上、ロックが不完全な状態で保持されないような機構になっていると考えられますが、長年の使用による劣化や歪みなどが原因で、このような状態となることもあります。シルバーカーは介護保険の貸与対象ではなくモニタリングでの点検も無いことから、ユーザー自らが日常点検することが求められます。歪みがあったり劣化していることがわかったら、危険な状態と認識し新しいものにすることも大切です。

参考要因

- 人：歪みがあることに気が付かなかった
- モノ：長年の使用で歪みが出ていた
- 環境：家族など日常点検してくれる人が身近にいなかった
- 管理：危険な状態である歪みの程度が具体的に示されていなかった