


福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 45

背上げ時にベッド用テーブルが外れ、上のモノがズレ落ち、やけどを負いそうになる

場面の説明

マットレスと掛け布団の厚みで、ベッド用テーブルが押し上げられる

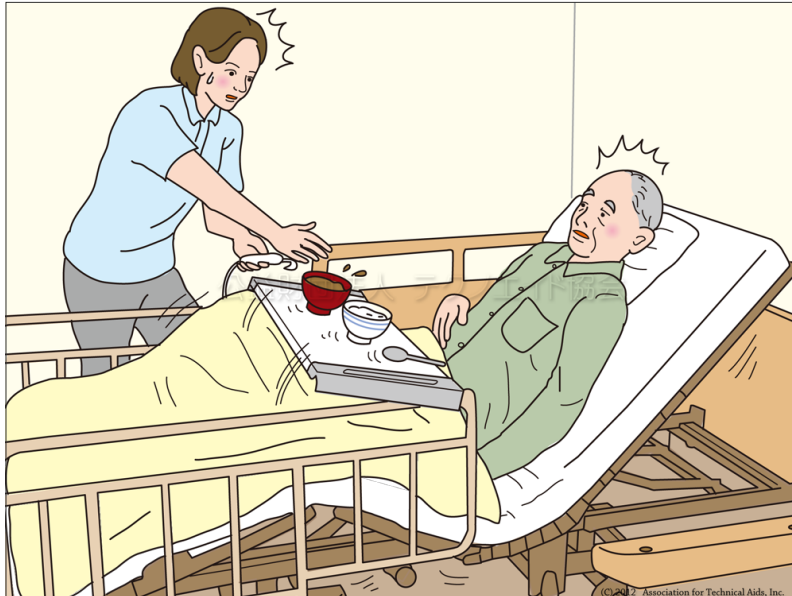

利用シーン

起居・就寝
食事

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

特殊寝台付属品

分類コード(CCTA95) 180315(ベッド用テーブル)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

ベッドの柵（サイドレール）の高さ、マットレスの厚さ、ベッド用テーブルの設置位置など様々な要因が考えられますが、基本的には「ベッド用テーブルは簡単に外れる」という認識を持つことが大切です。目的にあった姿勢に整えてからベッド用テーブルを取り付ける手順で、このようなヒヤリ・ハットの防止につながります。

参考要因

人：膝上げをすることで、ベッド用テーブルに膝がぶつかることを予想できなかった
環境：マットレスと布団の厚みがある