


## 福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 46

ベッド用グリップにガタツキが生じ、利用者がバランスを崩し、転倒しそうになる

### 場面の説明

差し込み口のねじがゆるみ、ベッド用グリップをつかんだ際、前のめりになった

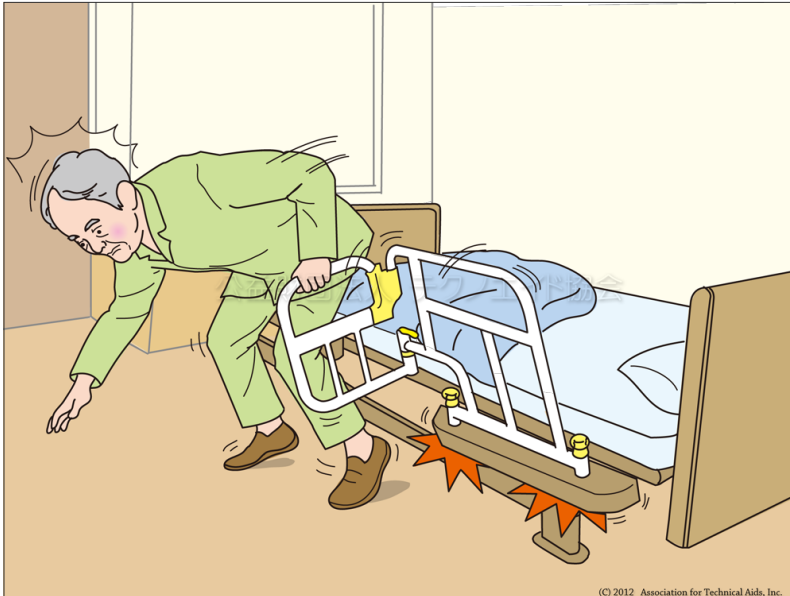

利用シーン

起居・就寝  
立ち座り

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

特殊寝台付属品

分類コード(CCTA95)

181227(ベッド用サイドレール,  
ベッド固定式起き上がり手すり)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



### 解説

ベッド用グリップを差し込む受け口は、日常的に取り外しなどのねじの操作をする部分ではありませんが、使用頻度などの条件によってはねじがゆるむことも考えられます。また、設置時のねじの締め忘れも考えられます。ちょっとしたガタツキでも気になる点があれば、メンテナンスを依頼するよう心がけてください。

### 参考要因

人：ガタツキが生じていることに気づかない  
モノ：使用によって緩みやすい構造のネジであった  
管理：定期的に締め付け具合等を確認する約束事が作られていない