
福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 50

ベッド用グリップをベッドに固定するねじがゆるんでおり、前方へ転倒しそうになる

場面の説明

ベッドから立ち上がろうとアームをつかんで体重をかけた際、ベッド用グリップがはずれて前のめりになった

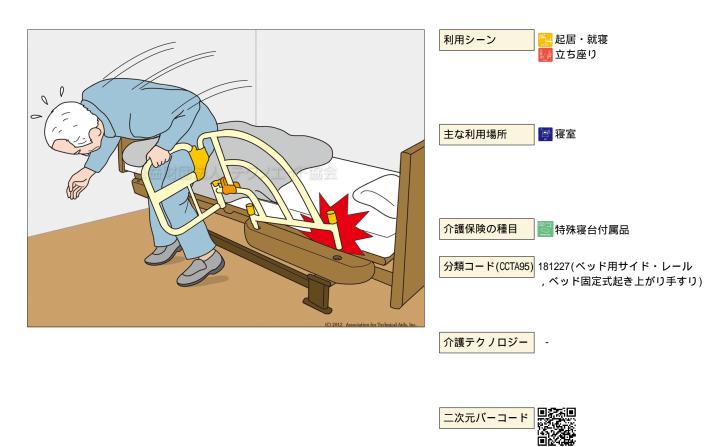

解説

ねじのゆるみは定期的なメンテナンスで防止するものですが、何らかの理由で一度取り外し、再び設置した際に ねじを締め忘れるようなことも考えられます。ベッド用グリップは手すりとして身体を支える重要な付属品とい う認識を持つことが大切です。

参考要因

人:ねじの締めつけが不十分であることに気づかなかった 環境:定期的にねじのゆるみを確認していなかった