

## 福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 59


スロープを上るときに介助者の足がすべり、車いすごと後方へ転倒しそうになる

### 場面の説明

雨が降り、早く利用者を施設内に入れようと急いでスロープを上ろうとした



利用シーン

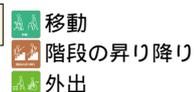

主な利用場所



介護保険の種目



分類コード (CCTA95) 183015 (携帯用スロープ)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



### 解説

雨で地面がぬれている時や、冬季で霜が降りている時などには特に注意が必要です。介助者の支える力に対してスロープの傾斜が大きすぎると危険性も高まりますので、余裕をもった角度設定をすることが大切です。

### 参考要因

人：スロープ昇降の介助を安全に行う体力がなかった  
モノ：段差の高さに対し短いスロープだった  
環境：安全な傾斜のスロープを利用する広さがなかった  
環境：雨で地面がぬれていた