


福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 60

歩行器から片方の手を離し、便蓋を開けようとした時、バランスを崩しケガをしそうになる

場面の説明

歩行器を片手だけで支えた状態でポータブルトイレの蓋を開けようとしたため、バランスを崩し転倒しそうになった

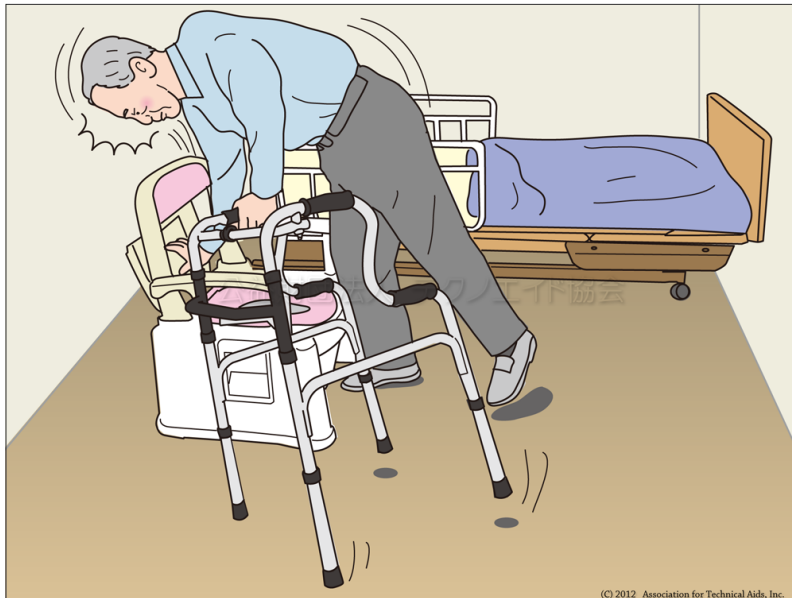

利用シーン

移乗
立ち座り
排泄

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

歩行器

分類コード(CCTA95) 120603(歩行器)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

歩行器は4脚のフレームの中に身体を入れ、両手で支えて立位や歩行の安定を図る用具です。この事例のような片手での使い方は適切ではありませんので、床置き形手すりのような安定性の高い用具を利用してください。

参考要因

人：片手での使用が危険であることを認識していなかった
環境：ポータブルトイレがベッドから遠い位置に置かれていた