

## 福祉用具ヒヤリハット情報

Case : 69

歩行車のフレームを手すり代わりに使用してしまい、転倒しそうになる

### 場面の説明

ベッドから立ち上がるのと、歩行車のフレームをつかんだ際、歩行車が動いて前方に倒れそうになった



利用シーン

移乗  
立ち座り

主な利用場所

寝室

介護保険の種目

歩行器

分類コード (CCTA95)

120606 (歩行車)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



### 解説

歩行車はあくまで歩行の補助を目的としています。軽量に作られており、立ち座りの時などに手すりとして使用できるほどの安定性を備えてはいません。立ち座りに補助が必要な場合、ベッド付属品のベッド用グリップや床置き形手すりなどの、目的に則した福祉用具を使用しましょう。

### 参考要因

人：手すり代わりに使用していた  
人：このくらいなら頼っても大丈夫と思っていた  
人：提供者からの注意喚起が欠けていた  
環境：ほかに頼る場所がなかった