


Case : 84

ストラップがはずれ、バランスを崩し転落しそうになる

場面の説明


入浴介助の最中、何度か上げ下ろしするうちにストラップがフックから外れていた

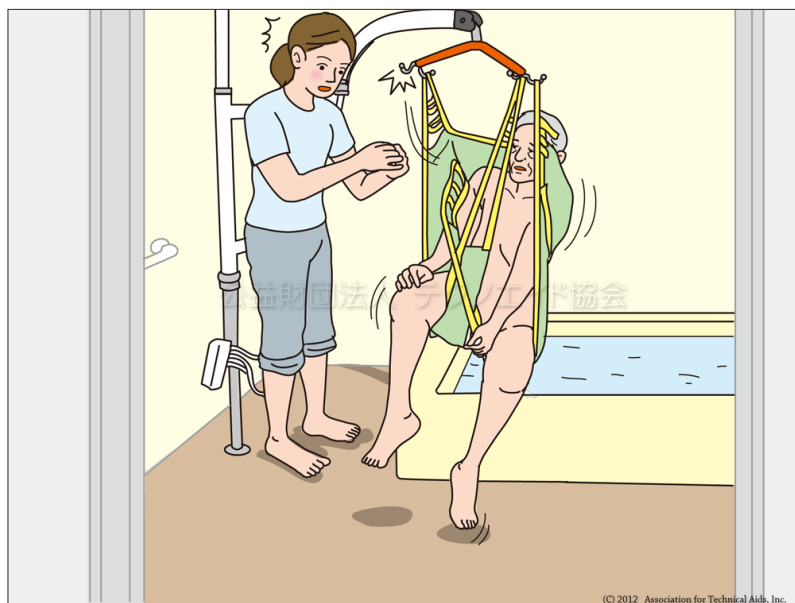


利用シーン



主な利用場所

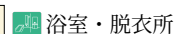

介護保険の種目

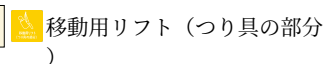

分類コード (CCTA95) 123621(吊り上げ式リフト用吊具)

介護テクノロジー



二次元バーコード



解説

とても危険な事例です。ストラップがフックにかかっていることを確認しながら昇降させることが基本ですが、浴室での利用の場合には、浴槽に降りたときにストラップがゆるみ、フックから外れかかってしまうことがあります。フックにかけたときだけでなく、一度ストラップがゆるむタイミングでも確認しましょう。

参考要因

人：ストラップがフックにかかっていることを確認していなかった

人：最初に一度確認すればその後は外れないと思っていた

環境：このような利用方法の際に、途中でストラップが外れる可能性があることを教えてくれる人が周囲にいなかった

管理：ほかの人が経験したヒヤリハットを利用して危険を予防する取組をしていなかった