


Case : 93

座面を回転させた際に、足がキャストにあたりケガをしそうになる

場面の説明

シャワーキャリーの足置きを跳ね上げており、足がぶらついた状態で座面を回転させてしまった

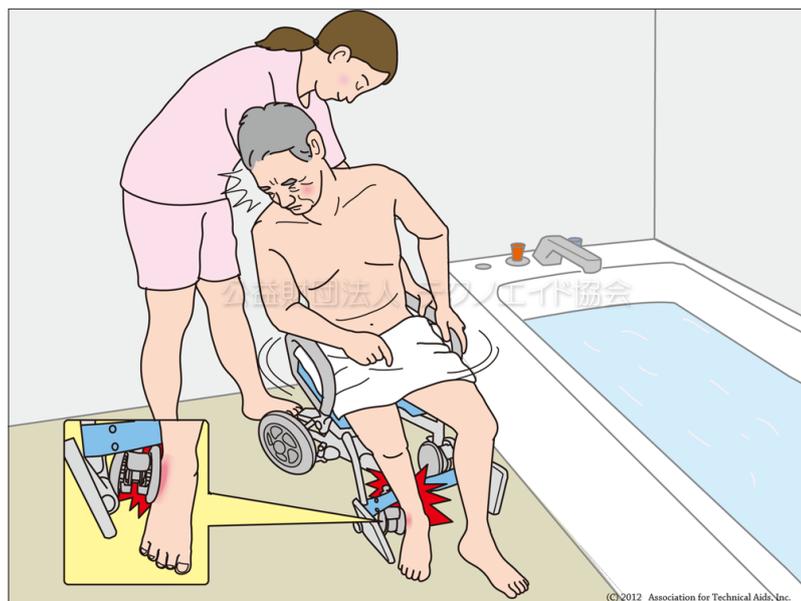

利用シーン

入浴

主な利用場所

浴室・脱衣所

介護保険の種目

入浴補助用具

分類コード(CCTA95) 093303(入浴用チェア)

介護テクノロジー

-

二次元バーコード



解説

座面が回転するなど、機能が深いシャワーキャリーでは、その分注意をするポイントも増えてきます。特に浴室内ではスペースが十分でなかったり、介助者から見えづらい箇所もあるなど危険が高まりますので、日ごろから危険箇所を意識し、十分注意して利用しましょう。

参考要因

人：介助者から利用者の足元が見えにくかった
モノ：足置きを跳ね上げた状態でも座面が回転する