

# 福祉用具「事故・ヒヤリハット」情報 研修教材の出力方法

## 福祉用具「事故・ヒヤリハット」情報

Information on accidents and near-misses of welfare equipment

ホーム > 研修教材

事例検索

事例集

情報提供のお願ひ

情報の取り扱い

リンク集

**研修教材**  
NEW

お知らせ  
NEW

### 研修教材 を利用シーンから探す

利用シーンで事例を抽出できます

起床・就寝 (90件)
 移乗 (67件)
 立ち座り (56件)
 移動 (175件)
 排泄 (19件)
 入浴 (40件)
 食事 (9件)
 整容 (0件)

コミュニケーション (0件)
 リモコン操作 (35件)
 階段の昇り降り (20件)
 外出 (98件)
 乗り物 (14件)
 夜間 (18件)
 その他 (22件)

### フリーワード検索

フリーワードで検索できます

8月29日時点 **412件**

412件の結果があります

1 2 3 4 >

| ダウンロード                   | イメージ図 | 事例                                                       | 介護保険の種目 | 分類コード             | 解説                                                                       |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |       | Case : 1<br><u>下に落ちたモノを拾おうとして、前方へ転落しそうになる</u>            | 車いす     | 122106 (後輪駆動式車いす) | これは意外に多く起こっている事例です。大切なモノを下に落として慌てたのかも知れませんが、足をフットサポートから下ろさずに前かがみになったことな… |
| <input type="checkbox"/> |       | Case : 2<br><u>フットサポートを踏んだ状態で立ち上がり、車いすごと転倒しそうになる</u>     | 車いす     | 122106 (後輪駆動式車いす) | 高いところにあるモノを取ろうとすると足元に注意がいらず、このような危険な事例が起こりやすくなります。フットサポートから足を下ろすことを習慣化…  |
| <input type="checkbox"/> |       | Case : 3<br><u>わずかな段差を上ろうとして、後方へ転倒しそうになる</u>             | 車いす     | 122106 (後輪駆動式車いす) | 手押しハンドルに重い荷物をかけて車いすで移動する場合、段差や上り坂を移動しようとする、重心が後方にかかりやすくなり、後方に転倒しやすくなり…   |
| <input type="checkbox"/> |       | Case : 4<br><u>車いすを開く時に、手指を挟みそうになる</u>                   | 車いす     | 122103 (介助用車いす)   | 車いすの操作に不慣れな人に起こりやすいヒヤリ・ハットではないでしょうか。車いすの操作の説明をする人は、このようなことが起きないように注意を促し… |
| <input type="checkbox"/> |       | Case : 5<br><u>フットサポートが急に倒れ、身動きがとれず、前方へ転倒しそうになる</u>      | 車いす     | 122106 (後輪駆動式車いす) | 大きなケガにつながるとても危険な事例です。通常フットサポートを踏ね上げた時は、ある程度の固さで保持されており、容易に倒れるものではありません…  |
| <input type="checkbox"/> |       | Case : 6<br><u>利用者の足がフットサポートから落ちてしまい、車いすに巻き込みそうになる</u>   | 車いす     | 122106 (後輪駆動式車いす) | 車いすには本来レッグサポートなどの足が落ちない安全装備がありますが、介助者の都合などでそのような安全装備を外していることも多く、このような事…  |
| <input type="checkbox"/> |       | Case : 7<br><u>ベッドへの移乗時、車いすのフットサポートを引っ張ろうとして転倒しそうになる</u> | 車いす     | 122103 (介助用車いす)   | 慌てて車いすを引き抜こうとすると起こりやすい事例です。このような移乗方法のときは、利用者の足とフットサポートが…                 |

412件の結果があります

1 2 3 4 >

| ダウンロード                   | イメージ図                                                                             | 事例                                           | 介護保険の種目 | 分類コード            | 解説                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | Case: 1<br>下に落ちたモノを拾おうとして、前方へ転落しそうになる        | 車いす     | 122106（後輪駆動式車いす） | これは意外に多く起こっている事例です。大切なモノを下に落として慌てたのかもしれない。足をフットサポートから下ろさずに前かがみになったことな…  |
| <input type="checkbox"/> |  | Case: 2<br>フットサポートを踏んだ状態で立ち上がり、車いすごと転倒しそうになる | 車いす     | 122106（後輪駆動式車いす） | 高いところにあるモノを取ろうとすると足元に注意がいかず、このような危険な事例が起こりやすくなります。フットサポートから足を下ろすことを習慣化… |
| <input type="checkbox"/> |  | Case: 3<br>わずかな段差を上ろうとして、後方へ転倒               | 車いす     | 122106（後輪駆動式車いす） | 手押しハンドルに重い荷物をかけて車いすで移動する場合、段差や上り坂を移動しようとする、重心が後方にかかりやすくな…               |

「事例」欄をクリックすると詳細画面が開きます

福祉用具リハビリテーション情報検索

Case: 1  
下に落ちたモノを拾おうとして、前方へ転落しそうになる

場面の説明

乗用車を下に落としてしまい、フットサポートに足を乗せたまま、利用者があわてて拾おうとした



利用シーン: 移動  
主な利用場所: リビング・玄関  
介護保険の種目: 車いす  
分類コード: 122106（後輪駆動式車いす）  
このページの二次元バーコード: ダウンロード

解説

これは意外に多く起こっている事例です。大切なモノを下に落として慌てたのかもしれない。足をフットサポートから下ろさずに前かがみになったことなどが原因ですが、リチャーなどモノを拾い上げる福祉用具もあるので、備えていると安心です。

参考要因

人: フットサポートから足を下ろすのを忘れていた  
人: 大切なモノを落とし、あわててしまう  
環境: 正しい動作を教えてくれる人がいなかった

研修教材の印刷

講師用 受講者用 両方

「講師用」「受講者用」「両方」のいずれかを選択するとPDFが開き、データのダウンロードや印刷が可能です

福祉用具リハビリテーション 研修教材（講師用）

Case: 1  
下に落ちたモノを拾おうとして、前方へ転落しそうになる

場面の説明

乗用車を下に落としてしまい、フットサポートに足を乗せたまま、利用者があわてて拾おうとした



利用シーン: 移動  
主な利用場所: リビング・玄関  
介護保険の種目: 車いす  
分類コード: 122106（後輪駆動式車いす）  
このページの二次元バーコード: ダウンロード

解説

これは意外に多く起こっている事例です。大切なモノを下に落として慌てたのかもしれない。足をフットサポートから下ろさずに前かがみになったことなどが原因ですが、リチャーなどモノを拾い上げる福祉用具もあるので、備えていると安心です。

参考要因

人: フットサポートから足を下ろすのを忘れていた  
人: 大切なモノを落とし、あわててしまう  
環境: 正しい動作を教えてくれる人がいなかった

福祉用具リハビリテーション 研修教材（受講者用）

Case: 1  
下に落ちたモノを拾おうとして、前方へ転落しそうになる

場面の説明

乗用車を下に落としてしまい、フットサポートに足を乗せたまま、利用者があわてて拾おうとした



どのような要因が考えられますか？

人（本人・介護者・関係者）の要因

モノ（福祉用具）の要因

環境の要因

管理の要因

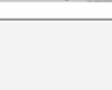
メモ

Copyright 2024 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.

複数の事例を選択することもできます

412件の結果があります

1 2 3 4 >

| ダウンロード                              | イメージ図                                                                               | 事例                                                  | 介護保険の種目 | 分類コード                | 解説                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |    | Case: 1<br><u>下に落ちたモノを拾おうとして、前方へ転倒しそうになる</u>        | 車いす     | 122106 (後輪駆動式車いす)    | これは意外に多く起こっている事例です。大切なモノを下に落として慌てたのかもしれない。足をフットサポートから下ろさずに前かがみになったことな…   |
| <input type="checkbox"/>            |    | Case: 2<br><u>フットサポートを踏んだ状態で立ち上がり、車いすごと転倒しそうになる</u> | 車いす     | 122106 (後輪駆動式車いす)    | 高いところにあるモノを取ろうとすると足元に注意がいらず、このような危険な事例が起こりやすくなります。フットサポートから足を下ろすことを習慣化…  |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    | Case: 3<br><u>わずかな段差を乗り越えようとして、後方へ転倒しそうになる</u>      | 車いす     | 122106 (後輪駆動式車いす)    | 手押しハンドルに重い荷物をかけて車いすで移動する場合、段差や上り坂を移動しようすると、重心が後方にかかりやすくなり、後方に転倒しやすくなり…   |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    | Case: 4<br><u>車いすを開く時に、手指を挟みそうになる</u>               | 車いす     | 122103 (介助用車いす)      | 車いすの操作に不慣れな人に起こりやすいヒヤリ・ハットではないでしょうか。車いすの操作の説明をする人は、このようなことが起きないように注意を促し… |
| <input type="checkbox"/>            |    | Case: 5<br><u>フットサポートが急に倒れ、身動きがとれず、前方へ転倒しそうになる</u>  | 車いす     | 122106 (後輪駆動式車いす)    | 大きなケガにつながるとても危険な事例です。通常フットサポートを跳ね上げた時は、ある程度の固さで保持されており、容                 |
| <input type="checkbox"/>            |   | Case: 18<br><u>狭い道で、前方へ転倒しそうになる</u>                 | 車いす     | 122106 (後輪駆動式車いす)    | に絡みつき、走行できなくな…                                                           |
| <input type="checkbox"/>            |  | Case: 19<br><u>長い下り坂で急ハンドルをとり、転倒しそうになる</u>          | 車いす     | 122124 (電動三輪車・電動四輪車) | 基本的に“急発進”や“急ハンドル”など急のつく操作には危険が伴いますので厳禁です。特に下り坂では勢いがついているので転倒事故につながりやすい…  |
| <input type="checkbox"/>            |  | Case: 20<br><u>電源を切り忘れて、降りるときに本体が動き出し、転倒しそうになる</u>  | 車いす     | 122124 (電動三輪車・電動四輪車) | 降車前に電源を切ることを習慣化することが必要です。乗降の際にはハンドルを手すり代わりにする人が多いので、アクセルレバーを誤操作しないように心…  |

1 2 3 4 >

研修教材の印刷

講師用 受講者用 両方

選択した事例の教材 PDF が一括で表示されます

福祉用具とサリハット 研修教材 (講師用)

Case: 1  
下に落ちたモノを拾おうとして、前方へ転倒しそうになる

画像の説明  
乗車位置を下に落とさない、フットサポートに足を乗せたまふ。利用者があてておろした。



解説  
これは意外に多く起こっている事例です。大切なモノを下に落として慌てたのかもしれない。足をフットサポートから下ろさずに前かがみになったことなどが原因ですが、リッチーなどモノを扱いやすい福祉用具もあるため、慣れしている人にとっては…

乗車位置 (乗降の際) であり、これだけが正解ということはありません。

人: フットサポートから足を下ろすのを忘れている人: 大きなモノを落とす、あててしまう  
乗降: 正しい動作を覚えておく必要がある人

Copyright 2024 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.

福祉用具とサリハット 研修教材 (受講者用)

Case: 1  
下に落ちたモノを拾おうとして、前方へ転倒しそうになる

画像の説明  
乗車位置を下に落とさない、フットサポートに足を乗せたまふ。利用者があてておろした。



どのような要因が考えられますか?

人 (本人・介護者・乗降者) の要因

モノ (福祉用具) の要因

乗降の要因

乗降の要因

メモ

Copyright 2024 Association for Technical Aids, Inc. All Rights reserved.