


Case : 101

浴槽内いすが急に動き、バランスを崩して浴槽内でおぼれそうになる

### 場面の説明

浴槽内いすから立ち上がろうと勢いをつけて動いた瞬間、いす本体が横にすべった

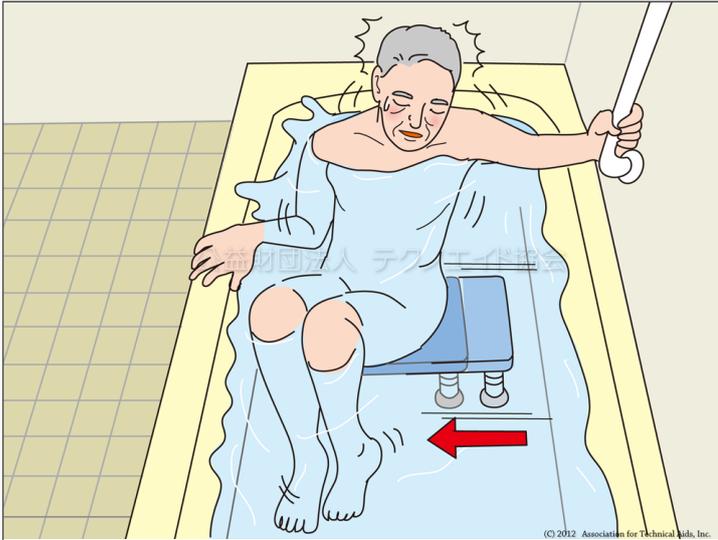

利用シーン	 入浴
主な利用場所	 浴室・脱衣所
介護保険の種目	 入浴補助用具
分類コード (CCTA95)	093303 (入浴用チェア)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

浴槽内いすは浴槽内での踏み台として使用することもある福祉用具です。不十分な固定では横方向に不意に動くことがあり重大な事故につながる危険もあります。立ち上がりのしづらい利用者が、勢いをつけて立ち上がろうとして突然すべり出す可能性もあり、身体機能や使用状況に合わせて選定するとともに、十分な固定力を確保しているかどうか、使用の都度確認することが重要です。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：利用の前に確実に固定されているか確認をしなかった
- 人：勢いよく立ち上がろうとした
- モノ：吸盤が古くなり、吸着力が落ちていた
- 環境：浴槽に湯がはってあり、中の様子がよく見えない

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 101

浴槽内いすが急に動き、バランスを崩して浴槽内でおぼれそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

場面の説明

浴槽内いすから立ち上がろうと勢いをつけて動いた瞬間、いす本体が横にすべった

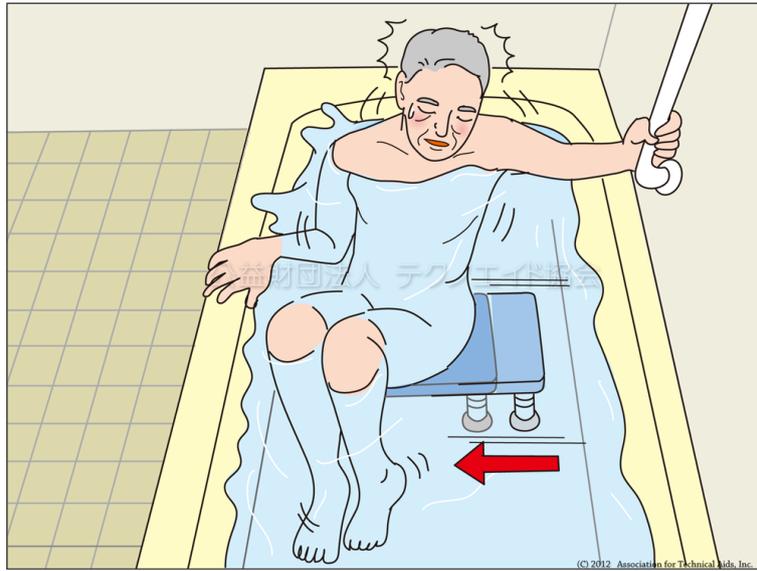

どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ