


Case : 170

話に夢中で不意にアクセルレバーに手が触れて車体が動き出し、転落しそうになる

### 場面の説明

話に気を取られていたため、不意に手がアクセルレバーを押してしまい、動きだしてしまった

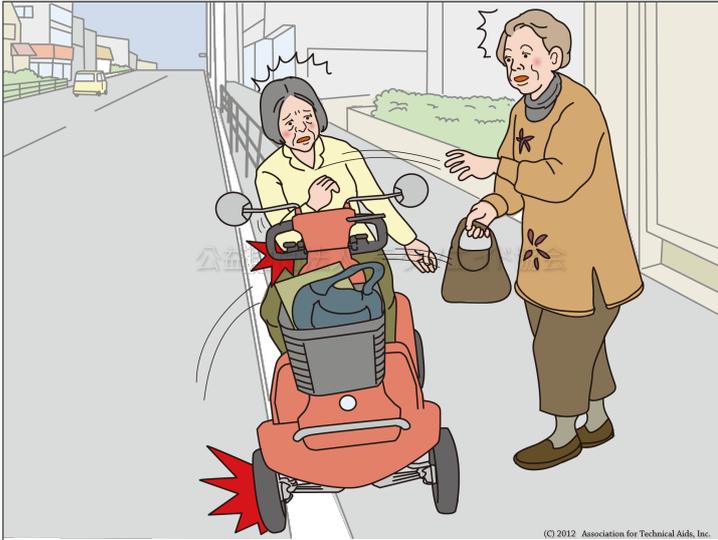

利用シーン	 移動  外出
主な利用場所	 その他
介護保険の種目	 車いす
分類コード (CCTA95)	122124 (電動三輪車・電動四輪車)
介護テクノロジー	—
二次元バーコード	

### 解説

ハンドル形電動車いすは、足腰の弱った高齢者にとって気軽な乗り物です。しかし、操作が簡単だからと言って安全なわけではありません。逆に、簡単な操作で動く仕組みだからこそ、誤った操作で急に動きだし事故に至る事例が多く発生しており、利用者の十分な注意が求められます。

### 参考要因（要因の例であり、これだけが正解ということではありません）

- 人：電源を切らずに話中に夢中になっていた
- 人：安全な場所で停車しなかった
- モノ：横を向いた時にちょうど肘をかけやすい位置にアクセルレバーがあった

日付：	所属：	氏名：
-----	-----	-----

Case : 170

話に夢中で不意にアクセルレバーに手が触れて車体が動き出し、転落しそうになる


事例詳細



回答前に見ないこと

### 場面の説明

話に気を取られていたため、不意に手がアクセルレバーを押してしまい、動きだしてしまった

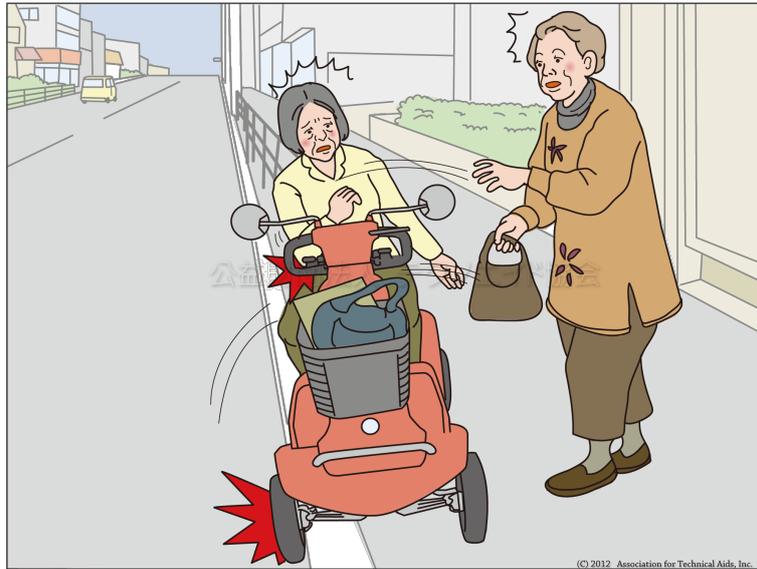

どのような要因が考えられますか？	どのような対策が必要でしょうか？
人（本人・介護者・関係者）の要因	
モノ（福祉用具）の要因	
環境の要因	
管理の要因	

メモ